


IT 1000 AW EURO 2

IT 500 AW EURO 2



Alle Mittel online.

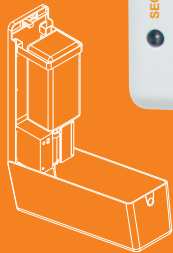

mit Sonderfunktion

SECURITY LOCK

gegen missbräuchliche Entnahme von Desinfektionsmittel

Qualität ist,
wenn der Kunde zurückkommt,
nicht das Produkt.

Wer mich scannt, erfährt mehr!

Die QR Codes führen Sie ohne Umwege zu noch mehr
Infos, Anleitungen und Produktvideos!



Weinmann GmbH
INFRATRONIC SOLUTIONS
Frankenstrasse 6
63776 Moembris

Telefon +49 (0) 6029 / 99303-0
Fax +49 (0) 6029 / 99303-29
Mail is@weinmann.gmbh
Web infratronic.de

Eintragung im Handelsregister.
Registergericht: Aschaffenburg
Registernummer: 8649

Umsatzsteuer-Identifikationsnr.
gem. §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE228141545
WEEE Nr.: DE78816620

Ihr **INFRATRONIC SOLUTIONS** Fachhandelspartner



Hauptstraße 2/1 . D-78665 Frittlingen
Fon: +49 7426 93181-24 . Fax: +49 7426 93181-20
info@dentabo.de . www.dentabo.de

© Weinmann GmbH. Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen
nur der Veranschaulichung. Änderungen vorbehalten.

Titelbild ©iStockphoto.com/shapecharge

V190207



**INFRATRONIC
SOLUTIONS**
we think globally



**Berührungslose
Spendersysteme
mit Sicherheitsfunktion**

gegen missbräuchliche Entnahme von Desinfektionsmittel


Sensorspender mit Sicherheitsfunktion

Berührungslose Ausgabe des Verbrauchsmittels ausschließlich nach erfolgreicher Authentifizierung.


Das sensorgesteuerte Spendersystem kann in unzähligen Einsatzgebieten verwendet werden und bietet durch die berührungslose Ausgabe maximalen Komfort. Doch die kinderleichte Entnahme birgt in manchen Situationen auch gewisse Risiken.

Besonders in **psychiatrischen Anstalten** oder **Einrichtungen für Demente** ist die unkontrollierte Desinfektionsmittelausgabe sehr gefährlich. Das Verschlucken von Desinfektionsmittel kann je nach Menge und Konzentration lebensbedrohlich sein.

Schützen Sie Ihre Patienten, indem Sie die Spendersysteme der neuesten Generation mit der **Sonderfunktion SECURITY LOCK** ausstatten. Dieses lässt eine berührungslose Ausgabe des eingelegten Verbrauchsmittels erst zu, nachdem sich Ihr Mitarbeiter vorher authentifiziert hat und **blockiert die Ausgabe** bei Ihren Patienten.

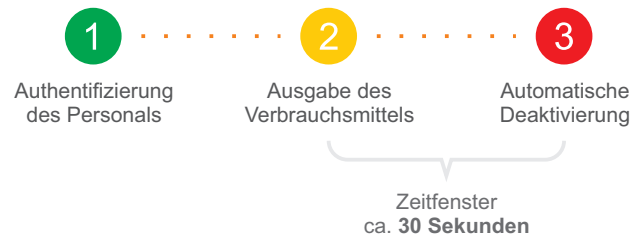

Die **Sonderfunktion SECURITY LOCK + TIMER** ist besonders für **Kantinen oder Personalräume** geeignet, welche in Stoßzeiten häufiger benutzt werden. Dieses ermöglicht eine **Benutzung innerhalb eines individuellen Zeitfensters**, nachdem sich einer Ihrer Mitarbeiter erfolgreich Authentifiziert hat.

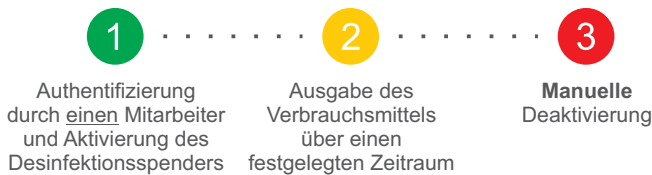

Innovatives System mit zusätzlichen Features



✓ **1** Eurospender

✓ **100%** nach Richtlinien des Robert-Koch-Instituts

✓ über **600** Verbrauchsmittel

✓ über **150.000** Hübe mit nur einem Batterie-Set optional auch mit Netzstrom möglich

Sonderfunktion
+ SECURITY LOCK
Ausgabe erst nach erfolgreicher Authentifizierung



Sensorspender übertrifft aktuelle Richtlinien

Nach Empfehlung des Robert-Koch-Instituts sollten Spender besser kontaktlos zu betätigen sein.

Ein Spendersystem, das man auf der ganzen Welt barrierefrei einsetzen kann - unabhängig von Mittel, Gebinde, Konsistenz und Energieversorgung. Das war unser Ziel, welches wir mit dem EURO Serie erreicht und der neuen EURO 2 Serie sogar übertraffen haben.

Maximale Flexibilität

Durch das mitgelieferte Flaschenadapter-Set ist das Spendersystem kompatibel zu den handelsüblichen Euronormflaschen. Der etwas kleinere IT 500 AW EURO 2 ist ausgelegt für Euroflaschen bis 500 ml, der größere IT 1000 AW EURO 2 sogar bis 1000 ml Euroflaschen.

In Kombination mit der Universal Schlauchdosierpumpe sind Sie zudem auch unabhängig in der Wahl Ihrer Seife und Desinfektionsmittel, egal welcher Konsistenz.

Optimale Ausgabemenge

Die Sensorspender der neuen Generation geben Ihnen immer vordefinierte Menge von ca. 1,55 - 1,65 ml aus. Das entspricht der optimalen Menge Desinfektionsmittel für eine Hand.

Zweimal angewandt entspricht das schon der hygienischen Händedesinfektion. Selbst die chirurgische Händedesinfektion ist problemlos möglich, da man 90 Sekunden lang immer wieder die optimale Menge zum feucht halten des Unterarms berührungslos ausgegeben bekommt. Es läuft nichts durch die Finger und tropft nicht auf den Boden.

Zusammengefasst

Nach der Authentifizierung bietet der Spender folgende Vorteile:

- ✓ berührungslose Ausgabe des eingelegten Mittels
- ✓ freie Wahl des Verbrauchsmaterials ohne umzufüllen
- ✓ gleichbleibende Ausgabemenge pro Hub ca. 1,55 - 1,65 ml
- ✓ restlose Gebindeleerung, ohne Nachtropfen
- ✓ abschließbar mit Sicherheitsschloss
- ✓ großes Fenster zur Inhalts- und Füllstanderkennung
- ✓ kein Reinigungsaufwand im Inneren des Gehäuses dank Einmal-Eurogebinde und austauschbarer Universalpumpe
- ✓ entspricht den RKI und KRINKO Anforderungen

- + Sicherheitsfunktion gegen missbräuchliche Mittelentnahme