



# VOCO Profluorid® Varnish

FLUORIDHALTIGER LACK ZUR ZAHNDESENSIBILISIERUNG

# VOCO Profluorid® Varnish

## STARKE WIRKUNG

### Hypersensitivität

Empfindliche Zähne sind ein in der Bevölkerung weit verbreitetes Problem. Sie verursachen beim Patienten meist temporäre Schmerzen, die gegenüber dem Behandler nicht immer erwähnt werden.


Die Ursache für Hypersensibilität sind in aller Regel offene Dentintubuli. Daher ist es Ziel der Behandlung, diese langfristig zu verschließen.

### Indikationen

Profluorid Varnish ist ein fluoridhaltiger Lack zur Behandlung von Hypersensibilität. Nach Kavitätenpräparationen oder bei empfindlichen Zahnhälsen werden die freiliegenden Dentintubuli effektiv versiegelt.

### Zusammensetzung und Wirkung von VOCO Profluorid® Varnish


Profluorid Varnish ist ein kolophoniumbasierter Lack mit einem Natriumfluoridgehalt von 5% (entspricht 22.600 ppm Fluorid). Das Fluoridion bewirkt zusammen mit in den Tubuli angereicherten Calciumionen eine Fällung von Calciumfluorid, die zum sicheren Verschluss der Tubuli führt. Eine Anwenderbe-

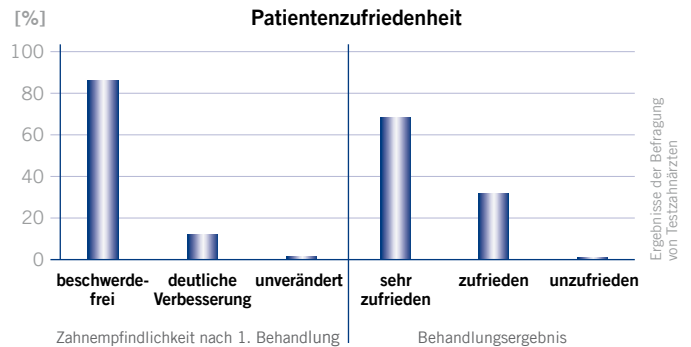

fragung ergab, dass über 85% der Patienten bereits nach der ersten Behandlung mit Profluorid Varnish absolut schmerzfrei gewesen sind.

Neben dem schnellen Verschluss der Dentintubuli bewirkt Profluorid Varnish die Bildung von Calciumfluoriddepots an der Zahnoberfläche, die den Zahn vor Säureattacken schützen, die Remineralisierung fördern und langfristig zur Bildung von Fluorapatit beitragen.

Weiterhin ist dem Lack Xylitol beigegeben. Neben seiner geschmacksverbessernden Eigenschaft besitzt Xylitol eine nachgewiesene kariostatische Wirkung.

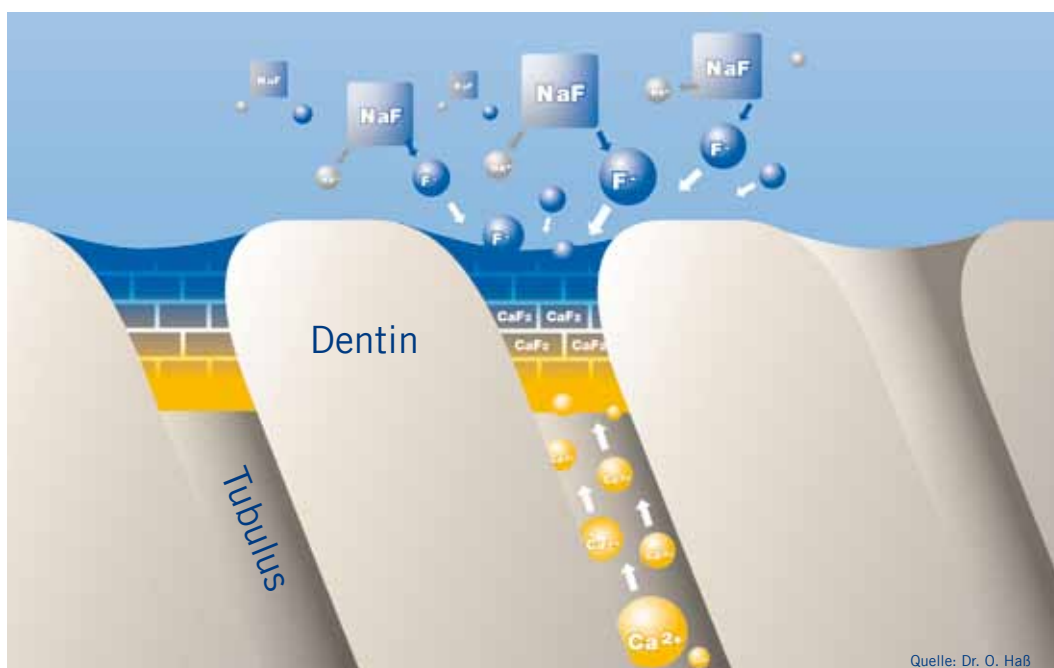

# VOCO Profluorid® Varnish





## EINFACH UND ÄSTHETISCH

### Leichte Anwendung

Die Kolophoniummatrix von Profluorid Varnish ermöglicht eine gute Haftung auch an feuchten Oberflächen. Eine vorherige Trocknung der zu behandelnden Flächen ist demnach nicht notwendig, so dass die Anwendung sehr zeitsparend ist. Dadurch wird die Kooperationsbereitschaft von Patienten mit geringer Compliance (z.B. Kinder) gesteigert.

### Ästhetik und Geschmack

Profluorid Varnish ist ein zahnfarbener Lack, der die Ästhetik nicht beeinträchtigt. Profluorid Varnish ist in vier angenehmen Geschmacksrichtungen erhältlich: Melone und Kirsche insbesondere für Kinder und jüngere Patienten, Minze als klassischer Geschmack vor allem für Erwachsene, und Karamell als der eher exotische Geschmack. Mit den vier raffinierten Geschmacksrichtungen können Sie noch mehr Service bieten und individuell auf Ihren Patienten eingehen.

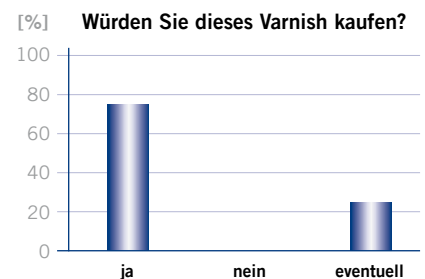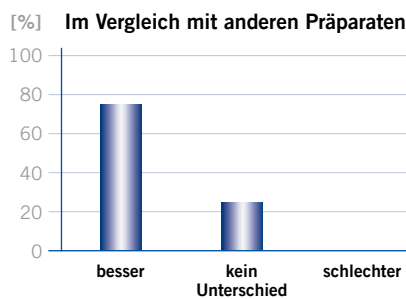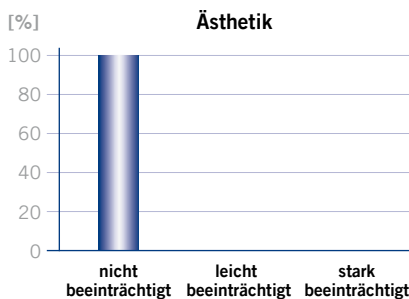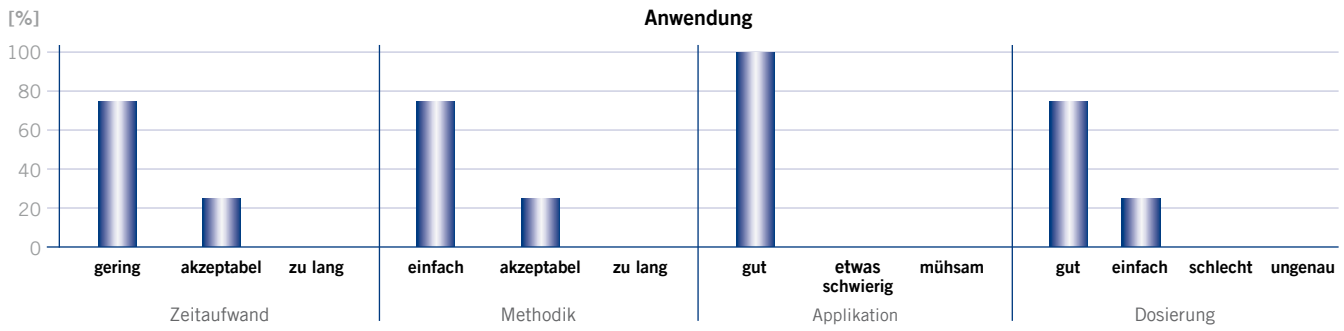

Ergebnisse der Befragung von Testzahnärzten

### Meinung von Zahnärzten


Zahnärzte, die das Produkt anwenden, attestieren Profluorid Varnish durchweg gute Handling- und ästhetische Eigenschaften, wobei das Gros der Anwender sogar einen deutlichen Vorteil zu Wettbewerbsprodukten feststellt. Ebenso gut schneidet Profluorid Varnish im Votum der Patienten ab. Fast alle Befragten sind nach der Behandlung beschwerdefrei oder bestätigen eine deutliche Verbesserung.

Profluorid Varnish: weit mehr als eine Frage des guten Geschmacks!

### Die Vorteile der SingleDose

Der Blister der Profluorid Varnish *SingleDose* enthält einen Pinsel und den Lack, womit ein hygienisch einwandfreies Produkt zur Anwendung gebracht wird.

### Einfache und ästhetische Desensibilisierung mit VOCO Profluorid® Varnish:

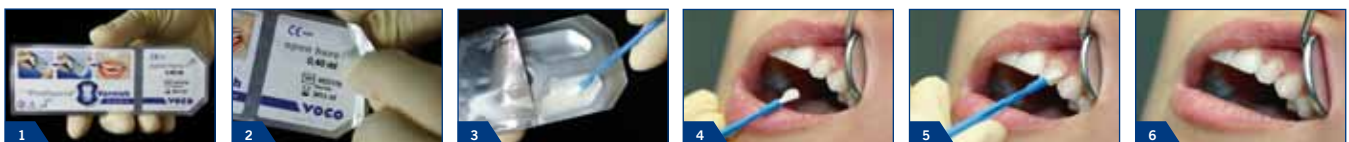

# VOCO Profluorid® Varnish

## SIE HABEN DIE WAHL

### Indikationen

Behandlung von hypersensiblen Zähnen  
 Versiegelung der Dentintubuli nach Kavitätenpräparationen  
 oder bei empfindlichen Wurzeloberflächen

### Produktvorteile

- Problemlose Anwendung auf feuchten Oberflächen
- Ästhetische, weiß-transparente Zahnfarbe
- Schnelle Desensibilisierung und Fluoridabgabe (5% NaF  $\approx$  22.600 ppm Fluorid)
- In vier Geschmacksrichtungen erhältlich: Melone, Minze, Kirsche und Karamell

### Vorteile der *SingleDose*

- Produkt und Applikator in der hygienischen Einwegverpackung
- Ohne zusätzliche Halterung verwendbar
- Auslaufsicher in jeder Position



**JETZT IN DREI NEUEN  
 GESCHMACKSRICHTUNGEN  
 ERHÄLTlich**

### Handelsformen

Geschmack	SingleDose 48 x 0,40 ml	SingleDose 50 x 0,25 ml	SingleDose 50 x 0,40 ml	SingleDose 200 x 0,40 ml	Tube 10 ml
Melone	–	REF 1268	REF 1269	REF 1271	REF 1267
Caramel	–	–	REF 2226	REF 2229	REF 2232
Cherry	–	–	REF 2227	REF 2230	REF 2233
Mint	–	–	REF 2228	REF 2231	REF 2234
Mixed	REF 2225	–	–	–	–

VOCO GmbH  
 Anton-Flettner-Straße 1-3  
 27472 Cuxhaven  
 Deutschland  
 Tel.: +49 (0) 4721-719-0  
 Fax: +49 (0) 4721-719-109  
 info@voco.de  
 www.voco.de

Zu beziehen durch: