

KaVo QUATTROcare CLEAN

Eine saubere Investition
in die Zukunft und
in Ihre Instrumente.



 ÖKOLOGISCH
UND RKI KONFORM



KaVo. Dental Excellence.

Reinste Sicherheit, höchste Effizienz ...

Perfekte Reinigung. Werterhaltende Pflege.

Qualität, Sicherheit, Hygiene – neue Standards und Richtlinien sorgen für steigende Anforderungen an zahnärztliche Praxen. Mit KaVo QUATTROcare CLEAN unterstützt KaVo Sie mit einer effizienten Lösung zur Reinigung und Pflege Ihrer Instrumente.

Die RKI-konforme Innenreinigung bietet Ihnen, dem Praxisteam und Ihren Patienten maximale Sicherheit. Gleichzeitig sorgt die Rundum-Pflege für die beste Werterhaltung Ihrer Instrumente und Turbinen. Sie bleiben zuverlässig einsetzbar – bei maximaler Lebensdauer, ohne vorzeitige Reparaturen.

Dank einfacher Handhabung und einem schnellen Programmablauf des KaVo QUATTROcare CLEAN erzielen Sie höchste Effizienz im Praxisalltag. Maximale Sicherheit der Reinigung und Pflege bei minimalen Kosten – KaVo QUATTROcare CLEAN macht den Unterschied.

Hygiene und Sicherheit für höchste Ansprüche.

Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) hat die in Deutschland verbindlichen Anforderungen für die Aufbereitung von Medizinprodukten in der zahnärztlichen Praxis definiert. Die Einhaltung dieser Anforderungen wird von den Behörden vor Ort bei Praxisbegehungen überprüft.

Mit KaVo QUATTROcare CLEAN erfüllen Sie diese deutschen RKI-Empfehlungen zur maschinellen Innenreinigung. Dank validierter Innenreinigung und bewährter KaVo-Qualität können Sie darauf zählen, dass Ihre hochwertigen Instrumente immer hygienisch sicher und zuverlässig einsetzbar sind.

Ein komplexes Sensor-System überwacht permanent die Funktionen des Gerätes und meldet gegebenenfalls Störungen. Alle Bestätigungsdaten werden im Gerät gespeichert und können via USB zur Dokumentation ausgelesen werden.

Machen Sie Ihren Instrumenten Dampf – RKI-konform, validiert und kosteneffizient.

Die Innovation des KaVo QUATTROcare CLEAN? Die neuartige Instrumenten-Innenreinigung auf Basis von Wasserdampf. Ganz einfach, und umweltfreundlich. Und das in bewährter KaVo-Qualität: Die validierte Reinigungswirkung in Kombination mit optimaler Pflege garantiert vorbildliche Werterhaltung bei geringeren Kosten.

Zusätzlich sorgt die innovative Dampftechnologie für einen geringen Verbrauch an Reinigungsmitteln – so schonen Sie Budget und Umwelt.

Per Gutachten validiert: KaVo QUATTROcare CLEAN wurde nach den neuesten Qualitäts- und Hygienestandards entwickelt. Der Wirkungsgrad der Innenreinigung wurde per Gutachten bestätigt – basierend auf den aktuell gültigen Prüfverfahren. KaVo QUATTROcare CLEAN erfüllt die Anforderungen der deutschen RKI-Empfehlungen an die Innenreinigung für „semikritisch-B und kritisch-B“-Anwendungen.

... für Sie und Ihre Instrumente.

Perfekte Pflege, geringe Kosten.

KaVo QUATTROcare CLEAN bietet Ihnen die wirtschaftlichste Lösung für RKI-konforme Innenreinigung und Pflege.

Fünf gute Gründe für Ihr Budget:

- 1 Geringe Investition bei der Anschaffung.
- 2 Hochwirksame und dabei kostengünstige Reinigungs- und Pflegemittel:
 - Handelsübliches demineralisiertes Wasser (Behälter-Volumen: 2,0 Liter = ca. 50 Instrumente)
 - KaVo QUATTROclean Reinigungszusatz (Eine Flasche = ca. 2.000 gereinigte Instrumente)
 - KaVo QUATTROoil (Eine Dose = ca. 1.500 gepflegte Instrumente)
- 3 Geringer Verbrauch durch Innenreinigung mit Wasserdampf-Anteil.
- 4 Einzelplatz-Dosierautomatik pro Pflegeplatz sichert optimale Ölmenge pro Instrument. Keine Überölung – keine Verschwendung – keine unnötigen Kosten.
- 5 Dauerhafte Kostenersparnis durch langlebige Instrumente und weniger Reparaturen.
- 6 Einfache und sichere Bedienung.

Kosteneffizienz – Entscheidende Vorteile für Sie:

- Geringe Anschaffungskosten
- Günstige Reinigungs- und Pflegemittel
- Geringer Verbrauch
- Werterhaltung Ihrer Instrumente

KaVo QUATTROcare CLEAN – die wirtschaftliche Lösung für RKI-konforme Reinigung und werterhaltende Pflege.



Reinigung mit demineralisiertem Wasser und KaVo QUATTROclean Reinigungszusatz.



Pflege mit KaVo QUATTROoil.



Mit den als Sonderzubehör lieferbaren Spitzen-Adaptoren können die Spraykanäle aller KaVo SONICflex Spitzen maschinell innen gereinigt werden.



KaVo QUATTROclean Flasche



KaVo QUATTROoil Dose



Optimaler Workflow ...

... und beste Werterhaltung.

Reinigung und Pflege in Rekordzeit.

Im Praxisalltag bleibt oft wenig Zeit für die Reinigung und Pflege Ihrer hochwertigen Instrumente. Deshalb sind eine einfache Handhabung und eine schnelle Wiederaufbereitung von zentraler Bedeutung.

KaVo QUATTROcare CLEAN fügt sich nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe ein – für eine Instrumentenreinigung und -pflege in Rekordzeit. Vollautomatisch, einfach per Knopfdruck und bei bis zu vier Instrumenten gleichzeitig.

Entscheidend dabei: Wie lange dauert es, bis Ihre Turbinen, Hand- und Winkelstücke gereinigt, gepflegt und nach der Sterilisation so abgekühlt sind, dass Sie wieder damit arbeiten können?

- Manuelle Außenreinigung (Abbürsten unter Wasser):

3 min

- Innenreinigung + Pflege mit KaVo QUATTROcare CLEAN:

+ 12 min

- Sterilisation im Autoklav


+ 18 min

- Gesamt-Wiederaufbereitungszeit für 4 Instrumente (zzgl. ca. 10 Min. Abkühlzeit) =

33 min

Hinweis!

Instrumente sind im Rahmen des Arbeitsablaufes der gesamten Wiederaufbereitung generell nach jeder Desinfektion oder vor jeder Sterilisation im KaVo QUATTROcare CLEAN zu reinigen und zu pflegen.

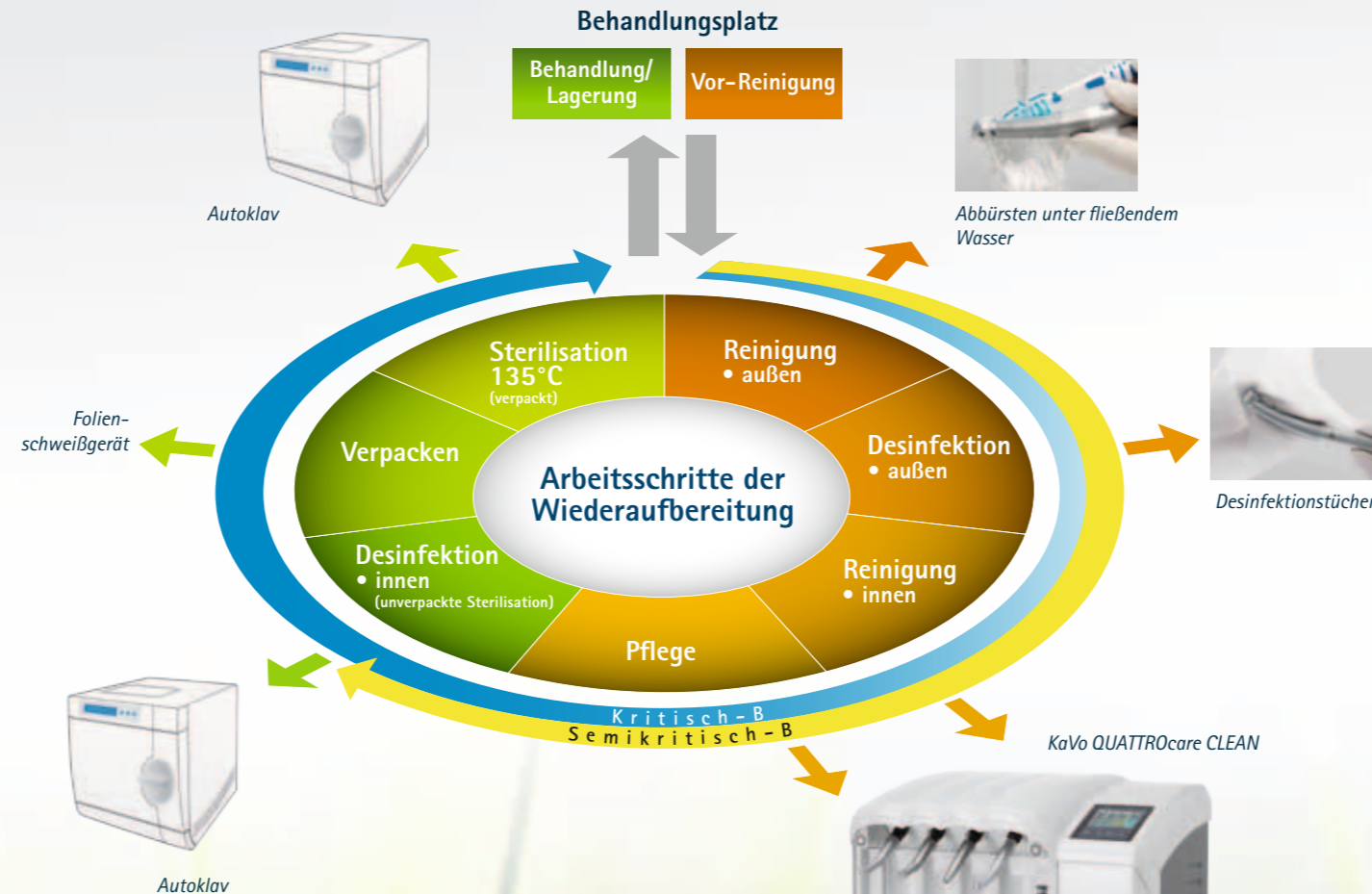

Werterhaltung einfach per Tastendruck.

KaVo QUATTROcare CLEAN sorgt mit einem automatischen Programmablauf in vier Schritten für die sichere Innenreinigung und optimale Pflege Ihrer Instrumente. Handelsübliches demineralisiertes Wasser mit KaVo QUATTROclean-Reinigungszusatz löst Blut zuverlässig auf, pulsierender Dampf reinigt alle Innenflächen, und das KaVo QUATTROoil schmiert alle beweglichen Innenteile. Abschliessend werden die Spray- und Getriebekanäle mit Druckluft ausgeblasen.

- Schritt 1:** Lösen von Proteinen mit demineralisiertem Wasser und QUATTROclean Reiniger.
- Schritt 2:** Reinigung durch pulsierenden Wasserdampf mit hohem Wirkungsgrad.
- Schritt 3:** Perfekte Pflege mit KaVo QUATTROoil.
- Schritt 4:** Ausblasen mit Druckluft – perfekte Sauberkeit.

Workflow und Sicherheit – Entscheidende Vorteile für Sie:

- Werterhaltende Reinigung und Pflege
- Perfekte Integration in Gesamtprozess
- RKI-konforme Innenreinigung
- Per Gutachten validiert

KaVo QUATTROcare CLEAN – beste Werterhaltung dank perfekter Reinigung und Pflege.

ÖKOLOGISCH
UND RKI KONFORM



So einfach zu bedienen ...

... und schonend zur Umwelt.

Effizienz im Handumdrehen.

KaVo QUATTROcare CLEAN bietet Ihnen auch in der Handhabung ein Höchstmaß an Schnelligkeit und Effizienz. Dank der bedienerfreundlichen Vollautomatik kann Ihr Praxisteam KaVo QUATTROcare CLEAN ohne zeitintensive Einarbeitung sofort bedienen.

Aufsetzen der Instrumente – schnell, sicher, komfortabel.

- Der patentierte Instrumententräger schwenkt mit dem Öffnen der Frontabdeckung automatisch um 60° nach vorne.
- So können Instrumente schneller und sicherer gewechselt werden.
- Die einfache und komfortable Handhabung minimiert die Verletzungsgefahr und das Beschädigungsrisiko der Instrumente.



Spannzangen-Pflegeansatz auf MULTIflex Pflegekupplung aufsetzen.



Spannzange des Instruments ansetzen und Programm starten.

Einfachste Bedienung für optimale Pflege.

- 1 Frontklappe öffnen und bis zu vier Instrumente aufstecken.
- 2 Frontklappe schließen, Programm wählen und Zyklusablauf starten.
- 3 Nach Zyklusende Frontklappe öffnen und Instrumente entnehmen.



Programm-Auswahl.



Fortschritts-Anzeige pro Instrument.



Prozess-Ende mit Erfolgsbestätigung.

Programm-Auswahl:

- P1** Reinigen + Pflegen + Ausblasen
- P2** Pflegen + Ausblasen
- P3** Reinigen + Ausblasen
- P4** Spannzangen-Pflege
- Frontklappe öffnen

Praktisch für Sie: KaVo QUATTROcare CLEAN ist universell einsetzbar. Sie können sowohl Ihre hochwertigen KaVo Instrumente reinigen und pflegen, als auch gängige Turbinen, Hand- und Winkelstücke anderer Hersteller (Fremd-Pflegeadapter als Sonderzubehör). Das separate Programm zur Spannzangen-Pflege sichert die Haltekraft und Lebensdauer der Spannzangen.

Gut für die Umwelt, gut für Ihre Instrumente.

Wasserdampf macht es möglich: Mit KaVo QUATTROcare CLEAN senken Sie nicht nur dauerhaft Ihre Kosten, sondern schonen auch die Umwelt. Denn die innovative Dampftechnologie kommt mit wenig Reinigungszusatz aus und sorgt dabei für beste Ergebnisse. KaVo QUATTROoil pflegt Ihre Instrumente mit umweltfreundlicher Druckluft ohne gefährliches Treibgas. Es ist dampfdurchlässig und die Sterilisierfähigkeit per Gutachten ist nachgewiesen.

KaVo QUATTROcare CLEAN – eine saubere Sache für Sie, Ihr Team und die Umwelt.

Das integrierte HEPA-Filtersystem verhindert, dass Aerosole oder Mikroorganismen in die Raumluft des Arbeitsplatzes gelangen können.

KaVo QUATTROcare CLEAN – die Zukunft perfekter Reinigung und Pflege.

KaVo setzt mit dem neuen KaVo QUATTROcare CLEAN neue Maßstäbe hinsichtlich der Sicherheit, Effizienz und Werterhaltung in der Instrumentenpflege. Mit KaVo QUATTROcare CLEAN entscheiden Sie sich für die wirtschaftlichste und nachhaltigste Lösung zur RKI-konformen Innenreinigung und Pflege. So profitieren alle von KaVo QUATTROcare CLEAN – Sie, Ihre Patienten und die Umwelt.

**Reinigung perfekt.
Kosten effizient.
Instrumente gepflegt.**

Bedienung und Umwelt – Entscheidende Vorteile für Sie:

- Einfachste Bedienung
- Sichere Handhabung
- Universell einsetzbar
- Umweltfreundlich



Technische Daten

Abmessungen:


Breite	48,5 cm
Tiefe	31 cm
Höhe	39,5 cm

Technische Details:

Gewicht	18,5 kg
Netzspannung	220 – 240 VAC
Netzfrequenz	50 – 60 Hz
Leistungsaugnahme	1800 W
Druckluftanschluss	4 – 6 bar
Druckluftverbrauch	ca. 65 NI/min

Empfohlene Aufstellbedingungen:

- Gute Raumbelüftung

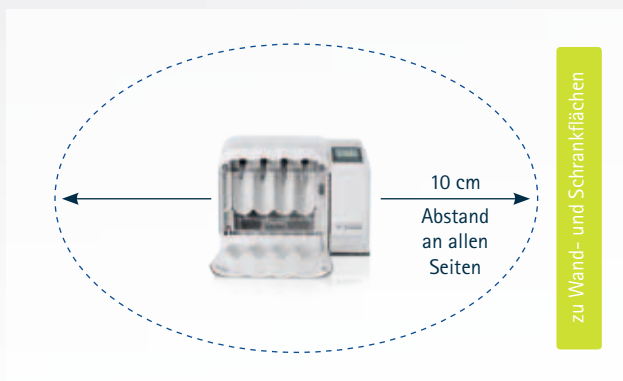

Zubehör

Produkt	Mat.-Nr.	Produkt	Mat.-Nr.
Pflegekupplung INTRAmatic	1.009.6143	KaVo QUATTROoil 2135P (Pack. mit 2 Dosen)	1.008.6834
Pflegekupplung MULTIflex	1.009.6142	KaVo QUATTROclean 2139P (Pack. mit 4 Flaschen)	1.008.6838
Pflegekupplung Köpfe	0.411.7941	Reinigungsadapter SONICflex-Spitzen, langes Gewinde	1.009.7875*
Pflegekupplung COMFORTdrive	1.005.1707	Reinigungsadapter SONICflex-Spitzen, kurzes Gewinde	1.009.7876*
Pflegekupplung INTRA matic Chirurgie	1.009.9489	Reinigungsadapter SONICflex-Spitzen, Chirurgie	1.009.7880*
Pflegekupplung SIRONA T1 Turbinen	1.000.7156*	Reinigungsadapter PIEZO LUX-Spitzen	1.009.7878*
Pflegekupplung BIEN-AIR	1.001.7860*	Reinigungsadapter PIEZO LED-Spitzen	1.009.7879*
Pflegekupplung W&H	1.001.7888*		
Pflegekupplung NSK Turbinen	1.000.8786*		
Pflegekupplung Borden 2-Loch	1.002.1217*		

* lieferbar nach Abschluß der laufenden Reinigungs-Validierung



KaVo. Dental Excellence.