

Filtek™ Bulk Fill
Seitenzahnkomposit



Besser
Einfach
Einfach Besser



3M ESPE

Filtek™ Bulk Fill Seitenzahnkomposit



Erleichtert Ihre nächste Seitenzahnfüllung

Eine Kombination von exzellenter Materialhandhabung und gleichzeitiger Vermeidung von zusätzlichen Verarbeitungsschritten und potentieller Fehlerquellen – wie das Legen mehrerer Inkremente – stellt nur dann eine echte Vereinfachung dar, wenn dabei wichtige Materialeigenschaften wie Biegefestigkeit, Abrasionsbeständigkeit und Schrumpfstress nicht negativ beeinflusst werden.

Filtek Bulk Fill Seitenzahnkomposit ist die effiziente und ökonomische Lösung für hochwertige Seitenzahnrestaurationen.




Beste Handhabung
und Modellierbarkeit



Inkrementstärken
bis zu 5 mm




Exzellente Adaptation

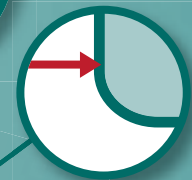


Hervorragende
Abrasionsbeständigkeit



Reduzierter
Schrumpfstress

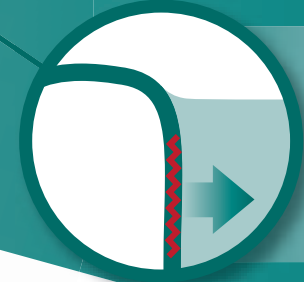


Hohe Röntgenopazität

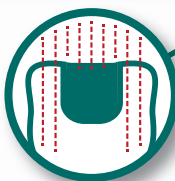

NEUES, EINZIGARTIGES KAPSELDESIGN

- **VERBESSERTER ZUGANG** zu tiefen Kavitäten
- **VERFORMBARER KAPSELAUSLASS** ermöglicht eine **INDIVIDUELLE ANPASSUNG** an schwer zugängliche Bereiche

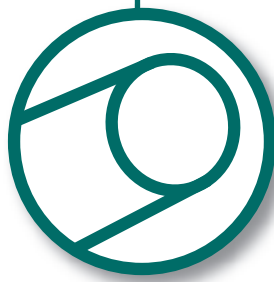

Schnelle
Polierbarkeit



150 westeuropäische Zahnärzte haben Filtek™ Bulk Fill Seitenzahnkomposit im Praxisalltag getestet

Filtek™ Bulk Fill
Seitenzahnkomposit
zeichnet sich aus

24%
SCHNELLER*

* 3M ESPE interne Daten.
Durchschnittliche Verarbeitungszeit
unter simulierten Realbedingungen im
Vergleich zu Inkrementtechnik

Die Resonanz:**

92%
EMPFEHLEN
DAS MATERIAL
IHREN KOLLEGEN

90%
ZUFRIEDENHEIT
MIT DER
HANDHABUNG

90%
KAUF
INTERESSE

** Interne Untersuchungen von 3M ESPE. Daten auf Anfrage
bei 3M ESPE erhältlich. Kontaktinformationen siehe Rückseite.

ohne AFM

mit AFM

Während Lichthärtung

Stress!

AFM-Monomer

Stress!

Stress!

Nach Polymerisation

AFM REDUZIERT DEN STRESS ohne die Biege-
festigkeit oder Abrasionsbeständigkeit zu mindern

Filtek Bulk Fill Seitenzahnkomposit beruht auf der seit Jahren erprobten Filtek Nanofüller-Technologie. Diese Technologie trägt nicht nur zu hoher Festigkeit, exzellenter Handhabung und Modellierbarkeit und einer besseren Abrasionsbeständigkeit bei, sondern bewirkt darüber hinaus eine schnelle und einfache Polierbarkeit.

Zusätzlich enthält das Seitenzahnkomposit Filtek Bulk Fill zwei innovative methacrylat Monomere (AFM und AUDMA). In Kombination tragen diese zu einer Reduktion des Schrumpfstresses bei, ohne die Biegefestigkeit oder Abrasionsbeständigkeit zu mindern.

Die einzigartige Kombination dieser zwei Technologien führt zu einem innovativen Füllungsmaterial – effizient in der Anwendung.

Beste Handhabung und
Modellierbarkeit

**SCHNELLE
POLIERBARKEIT +**

**BESTE
GLANZBESTÄNDIGKEIT**



Filtek™ Bulk Fill
Seitenzahnkomposit

SonicFill™

TetricEvoCeram®
Bulk Fill

Alert®

Quixx®

X-tra fil

Interne Laboruntersuchungen von 3M ESPE nach 6000 Zahnputzyklen.

Vereinfachen Sie Ihren Praxisalltag – starten Sie im Seitenzahnbereich

Klinischer Fall 3M™ ESPE™ Filtek™ Bulk Fill Seitenzahnkomposit



Ausgangssituation: Unterer erster Molare mit Kariesbefall approximal.



Situation nach der Amalgam Entfernung.



Nach der Polymerisation von Scotchbond™ Universal wird die Kavität mit Filtek™ Bulk Fill Seitenzahnkomposit in der Farbe A2 gefüllt.



Polymerisation der Füllung mit Elipar™ S10.



Finieren und ...



... Polieren der Füllung mit Sof-Lex™ Finier- und Polierradern.




Finale Situation mit ästhetischer Restauration.

Klinische Fotos mit freundlicher Genehmigung von Dr. G. Reich



Aufeinander abgestimmte Produkte für eine effiziente Füllungstherapie

1

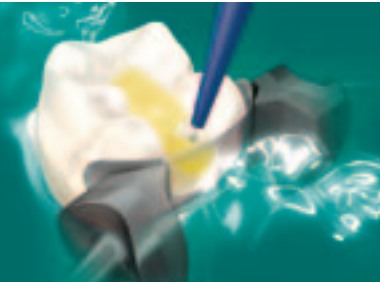


Scotchbond™ Universal

Adhäsiv

Ein Tropfen für alle Fälle! Hohe Haftwerte und praktisch keine postoperativen Sensitivitäten.



2

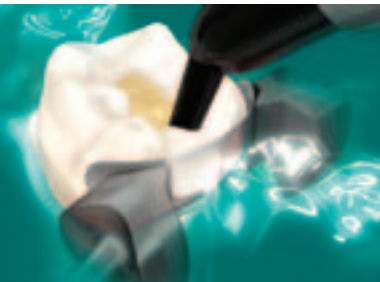

Filtek™ Bulk Fill

Seitenzahnkomposit

Exzellente Handhabung, hohe Festigkeit, hervorragende Abrasionsbeständigkeit und geringer Schrumpfstress.



3



Elipar™ S10

LED Polymerisationsgerät

Schnelle und sichere Polymerisation bei einfacher Zwei-Tasten-Bedienung.



4



Sof-Lex™

Finier- und Polierräder

Einfache Handhabung und schonend zur Gingiva, für schnellen, natürlichen Glanz aller Zahnoberflächen. Das schnelle und einfache Poliersystem für super Ergebnisse nach dem Konturieren.



Filtek™ Bulk Fill

Fließfähiges Komposit

Falls Sie sich für ein fließfähiges Bulk Fill Material interessieren, sollte unser mehrfach empfohlenes¹ Filtek™ Bulk Fill fließfähiges Komposit Ihre erste Wahl sein. Dieses Material wird von mehr als 90 % aller befragten Zahnärzte empfohlen². Es hat eine bis zu 50 % höhere Druckfestigkeit im Vergleich zu anderen Bulk Fill Materialien³.

- Unterfüllungsmaterial für Klasse I und II Restaurationen
- Schnelles Bulk Fill Basismaterial bis zu 4 mm Schichtstärke
- Abrasionsbeständige Lösung für kleine, nicht kaulstragende okklusale Bereiche, Klasse III und Klasse V⁴



1. Dental Barometer Testphase 05/2014 und Zahnmedizin Report 06/2014 höchste Auszeichnung
2. Daten aus einer Befragung zur Bewertung von Filtek™ Bulk Fill unter 215 deutschen Zahnärzten
Alle Daten auf Anfrage bei 3M ESPE erhältlich. Kontaktinformation siehe unten.

3. Im Vergleich zu SureFil SDR flow. 3M ESPE interne Daten
4. Vollständige Indikationsbreite ist der Gebrauchsanweisung zu entnehmen

Bestellinformationen

Filtek™ Bulk Fill Seitenzahnkomposit

Art.-Nr.	Produktinformation
4864TK	Füllungstherapie Starter Set Kapseln 40 Kapseln à 0,2 g in den Farben A2 und A3 (je 20), 5,0 ml Flasche Scotchbond™ Universal, 10 Sof-Lex™ Finierräder, 10 Sof-Lex™ Polierräder, 1 Mandrel RA, Technische Anleitung, Gebrauchsanleitungen
4863TK	Füllungstherapie Starter Set Spritzen 2 Spritzen à 4 g in den Farben A2 und A3 (je 1), 5,0 ml Flasche Scotchbond™ Universal, 10 Sof-Lex™ Finierräder, 10 Sof-Lex™ Polierräder, 1 Mandrel RA, Technische Anleitung, Gebrauchsanleitungen

Filtek™ Bulk Fill Seitenzahnkomposit – Refills

FARBEN	SPRITZEN	KAPSELN
A1	4863A1	4864A1
A2	4863A2	4864A2
A3	4863A3	4864A3
B1	4863B1	4864B1
C2	4863C2	4864C2

REFILL SPRITZEN 1 Spritze 4 g,
Technische Anleitung, Gebrauchsanleitungen.

REFILL KAPSELN 20 Kapseln à 0,2 g,
Technische Anleitung, Gebrauchsanleitungen.



Filtek™ Bulk Fill Seitenzahnkomposit –
Refill Farbe A1 (4864A1)



Filtek™ Bulk Fill Seitenzahnkomposit –
Füllungstherapie Starter Set Kapseln
(4864TK)

Filtek™ Bulk Fill fließfähiges Komposit – Refills

FARBEN	SPRITZEN	KAPSELN
A1	4862A1	4861A1
A2	4862A2	4861A2
A3	4862A3	4861A3
Universal	4862U	4861U

Art.-Nr.	Produktinformation
3740T	Applikationskanülen 20 Applikationskanülen

REFILL SPRITZEN 2 Spritzen à 2 g, 20 Applikationskanülen,
Technische Anleitung, Gebrauchsanleitungen.

REFILL KAPSELN 15 Kapseln à 0,2 g,
Technische Anleitung, Gebrauchsanleitungen.

www.3MESPE.de/FiltekBulkFill

3M ESPE

3M Deutschland GmbH
Standort Seefeld
3M ESPE - ESPE Platz
82229 Seefeld
Freecall: 0800 - 2 75 37 73
Freefax: 0800 - 3 29 37 73
info3mespe@mmm.com
www.3MESPE.de

3M (Schweiz) GmbH
3M ESPE Dental Products
Eggstr. 93 · CH-8803 Rüschlikon
Telefon: (044) 724 93 31
Telefax: (044) 724 92 38
3mespech@mmm.com
www.3MESPE.ch

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Telefon: (01) 86 686 434
Telefax: (01) 86 686 330
dental-at@mmm.com
www.3MESPE.at

3M, ESPE, Elipar, Filtek, Scotchbond und Sof-Lex sind Marken von 3M Company oder 3M Deutschland GmbH. Alle anderen Marken gehören anderen Unternehmen.
© 2014, 3M. Alle Rechte vorbehalten.
70210001767/02 (11.2014)