


# Dimensionsstabil

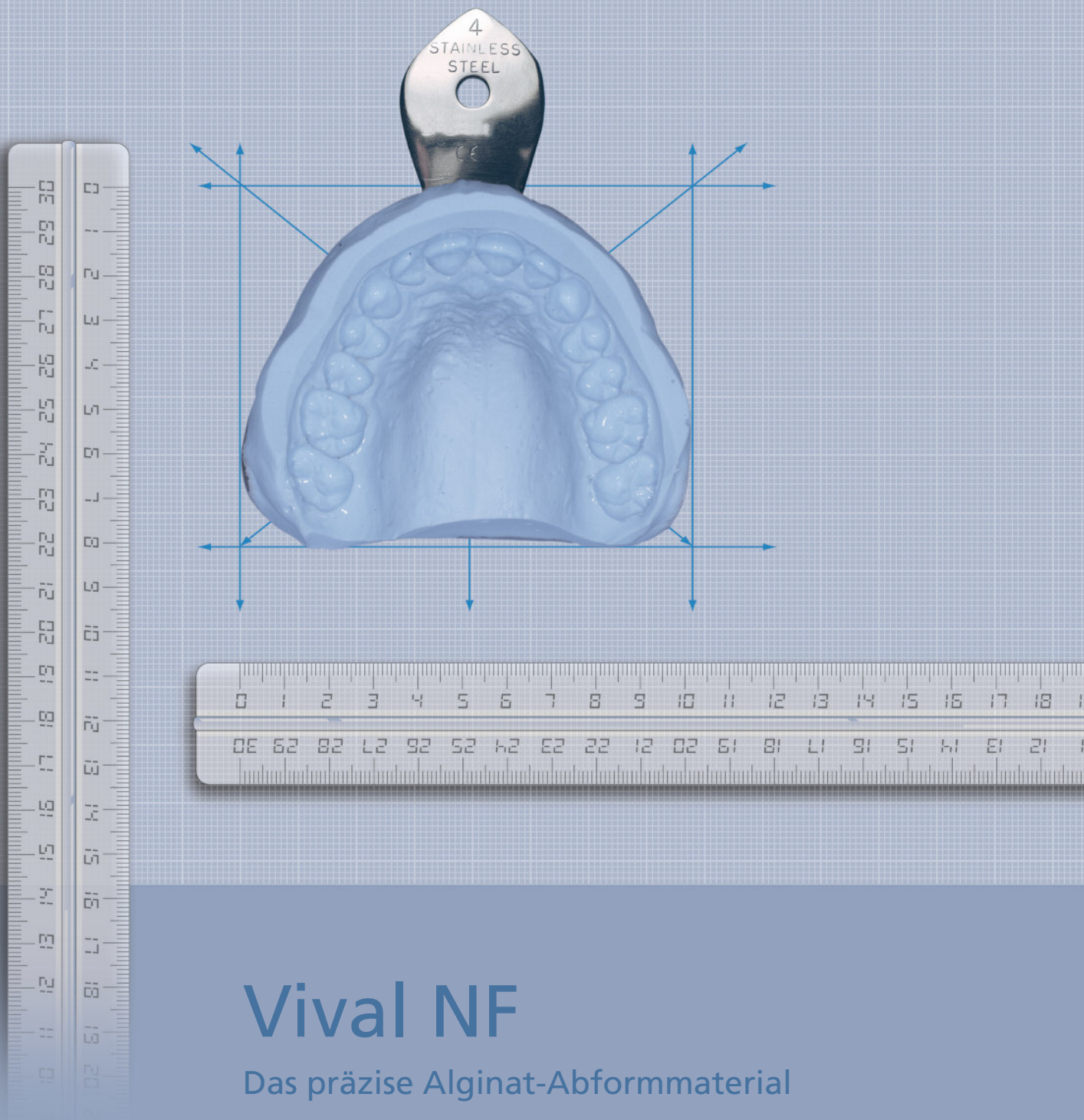


## Vival NF

Das präzise Alginat-Abformmaterial

# Vival NF

## Situationsabformung nach Mass

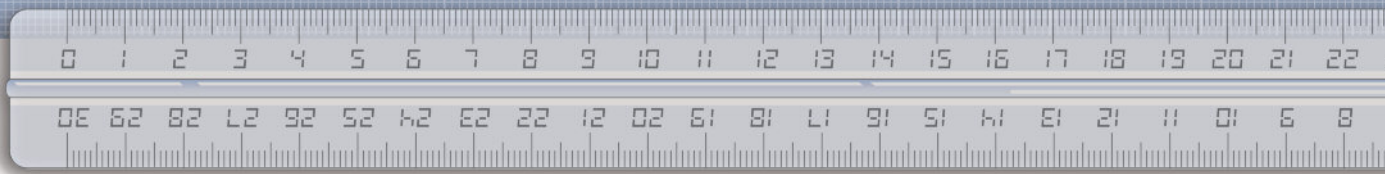

### Das präzise Alginat-Abformmaterial zur:

Situationsabformung von

- einzelnen Zähnen
- bezahnten, teilbezahnten oder unbezahnten Kieferabschnitten
- ganzen Kiefern


Vorabformung zur

- Erstellung von temporären Versorgungen


### Massgebende Koordinaten:

- **dimensionsstabil bis zu 100 Stunden**
- 98 % Rückstellvermögen
- thixotrop: fliesst nur bei Druck
- kompatibel zu aktuellen Gipsen
- cremige Konsistenz
- frischer Pfefferminzgeschmack


In 2 Min. 10 Sek.  
fertig abgeformt:

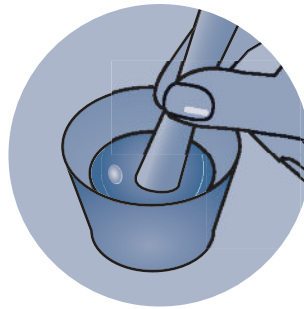

1 Anmischen mit Wasser:  
30 Sek.

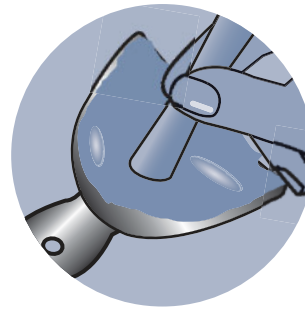

2 Verarbeiten auf Abformlöffel:  
40 Sek.

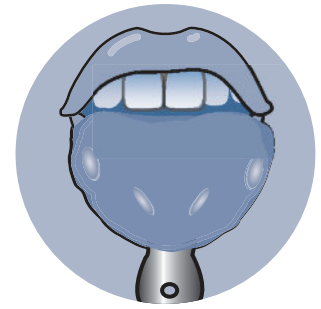

3 Verweilen im Mund:  
1 Min.

### Lieferformen

#### Intro Pack

- 2 x 500 g Vival NF
- 1 Messset (Löffel und Becher)
- 1 Plastikbox mit blauem Deckel



#### Multi Pack

- 20 x 500 g Vival NF
- 5 Messsets (Löffel und Becher)



Dieses Material wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäss Gebrauchsinformation verarbeitet werden. Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften und sind nicht bindend.  
Gedruckt in der Schweiz  
© Ivoclar Vivadent AG Schaan/Liechtenstein  
573270/0604/1.5/d/RDV

Hersteller und Vertrieb  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
FL-9494 Schaan  
Fürstentum Liechtenstein  
Tel. +423 / 235 35 35  
Fax +423 / 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Vertrieb Deutschland  
**Ivoclar Vivadent GmbH**  
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2  
D-73479 Ellwangen, Jagst  
Tel. +49 (0) 79 61 / 8 89-0  
Fax +49 (0) 79 61 / 63 26  
[info@ivoclarvivadent.de](mailto:info@ivoclarvivadent.de)  
[www.ivoclarvivadent.de](http://www.ivoclarvivadent.de)

**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation