



METASYS GREEN & CLEAN M2

NEU! VERBESSERTE REZEPTUR!
GREEN&CLEAN M2

Duales, aktiv entschäumendes Konzentrat zur Desinfektion und Desodorierung von Absauganlagen und Amalgamabscheidern.

- ▶ Duales System (rot / grün) gegen Bakterienresistenz
- ▶ Sehr gute aktive Entschäumung
- ▶ Einfaches Handling durch formschönen Dosierspender
- ▶ Hohe Umweltverträglichkeit
- ▶ Gute Materialverträglichkeit
- ▶ Enzymatisches Produkt mit ausgezeichneter Eiweißlösbarkeit
- ▶ Ideal für sämtliche Amalgamabscheider und Wasser-Luft-Separationen
- ▶ VAH/DGHM gelistet
- ▶ CE 0408

WIRKUNGSSPEKTRUM:
bakterizid/fungizid, Tb, HBV/HIV/HCV

MODERNE WIRKSTOFFKOMBINATION:
M2 grün: aliphatische Stickstoffverbindung, Alkylamin

M2 rot: quartäre Ammoniumverbindung, Alkylamin, Guanidinverbindung

GREEN&CLEAN M2 Einführset
2 x 480 ml Beutel + Dosierspender

BESTELL-NR.: 60010001-Farbbezeichnung
Dosierer: BL-Blau


GREEN&CLEAN M2 Nachfüllset 1
4 x 480 ml Beutel (320 Anwendungen)

BESTELL-NR.: 60010002

GREEN&CLEAN M2 Nachfüllset 2
2 x 480 ml Beutel (160 Anwendungen)

BESTELL-NR.: 60010003

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
Dr. med. J. Steinmann, Bremen
Dr. med. P. Weidner, Weiterstadt

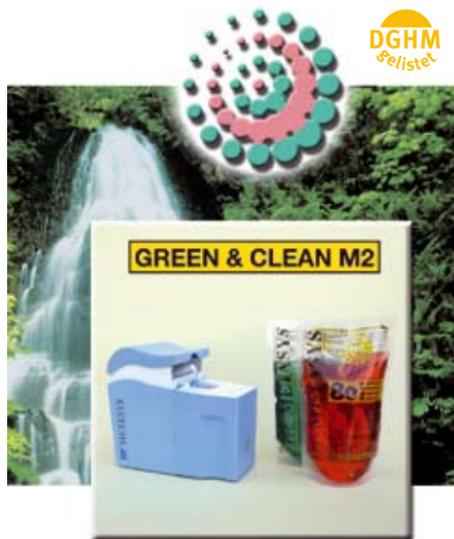

DGHM
gelistet

4 Beutel GREEN&CLEAN M2 reichen für 320 Anwendungen. Sichern Sie sich eine optimale Desinfektion und Pflege Ihrer Absauganlage und Ihres Amalgamabscheiders.



Desinfizieren leicht gemacht:



Dosieren:

Betätigen Sie 2-mal die Pumpe des Dosierspenders. Damit werden genau 6 ml GREEN&CLEAN M2 in das Mischgefäß befördert.



Anmischen:

Entfernen Sie den Mischbehälter vom Dosierspender, indem Sie ihn nach oben abnehmen. Füllen Sie den Mischbehälter bis zur Markierung mit Wasser auf (= 600 ml). Die so hergestellte Anwendungslösung ist 1%-ig.



Absaugen:

Halten Sie den kleinen Saugschlauch solange auf die mit 1 markierte Absaugöffnung, bis Sie das Einsaugen von Luft hören. Damit haben Sie automatisch in kürzester Zeit die richtige Menge von 200 ml Anwendungslösung eingesaugt. Mit dem großen Saugschlauch verfahren Sie bitte auf dieselbe Weise, indem Sie die mit 2 markierte Absaugöffnung benützen.



Desinfektion der Speischale:

Den im Mischbehälter verbliebenen Rest von 200 ml einfach in die Speischale leeren.

Die Desinfektion von Absauganlage und Mundspülbecken ist zweimal täglich vorzunehmen. Nach chirurgischen Eingriffen sollte zusätzlich eine Sonderreinigung durchgeführt werden! Somit gewährleisten Sie höchste Hygieneanforderungen sowie eine reibungslose Funktion Ihres Amalgamabscheiders.

METASYS

VK-Prospekt G&C, 29.05.2009 70010021 D A CH ZK55-103/03

GREEN & CLEAN



DIE SICHERHEIT für Ihre Praxishygiene



Technik der hygienischen Händedesinfektion:



Handfläche auf Handfläche



Handfläche auf Handfläche mit verschränkt gespreizten Fingern



Handfläche über Handrücken mit gespreizten Fingern



Außenseite der Finger (verschränkt) auf andere Handfläche



Daumen kreist reibend in der anderen geschlossenen Handfläche



Fingerkuppen kreisen reibend auf anderer Handfläche



GREEN&CLEAN HD
Pflegendes Einreibepreparat zur hygienischen Hände- und chirurgischen Hände- und Unterarmdesinfektion.

- ▶ Hochwertige Alkohole verhindern die Austrocknung der Haut
- ▶ Dermatologisches Gutachten (Dermaconsult GmbH)
- ▶ VAH/DGHM und RKI gelistet

WIRKUNGSSPEKTRUM

WIRKUNGSSPEKTRUM:
bakterizid, fungizid, Tb, HBV/HIV/HCV, sowie Herpes-simplex-Viren Typ I

EINWIRKZEITEN

EINWIRKZEITEN:
Hygienische Desinfektion:
3 ml GREEN&CLEAN HD 30 Sekunden lang auf Händen verreiben.
Chirurgische Desinfektion:
10 ml GREEN&CLEAN HD 3 Minuten lang auf Händen und Unterarmen verreiben.

BESTELNUMMERN

- GREEN&CLEAN HD Nachfüllset 2 1 x 5 l Kanister
BESTELL-Nr.: 60030063
- GREEN&CLEAN HD Nachfüllset 3 6 x 1000 ml Euroflasche
BESTELL-Nr.: 60030069
- GREEN&CLEAN HD Euroflasche 1000 ml
BESTELL-Nr.: 60030161
- GREEN&CLEAN HD Euroflasche 1 x 500 ml
BESTELL-Nr.: 60030162
- GREEN&CLEAN HD Euroflasche 6 x 500 ml
BESTELL-Nr.: 60030070

GUTACHTEN

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
Dr. med. J. Steinmann, Bremen
Prof. Dr. Wille, Gießen



GREEN&CLEAN HL
Pflegende Händewaschlotion mit breiter antimikrobieller Wirkung.

- ▶ Breite antiseptische Wirkung
- ▶ Alkalifrei, pH-neutral
- ▶ Schützt den natürlichen Säuremantel der Haut
- ▶ Beugt der Entstehung von Hautirritationen vor
- ▶ Mit Allantoin als Hautpflegesubstanz

BESTELNUMMERN

- GREEN&CLEAN HL Einführset 5 x 750 ml + Dosierflasche
BESTELL-Nr.: 60030051
- GREEN&CLEAN HL Nachfüllset 1 6 x 750 ml
BESTELL-Nr.: 60030052
- GREEN&CLEAN HL Nachfüllset 2 1 x 5 l Kanister
BESTELL-Nr.: 60030053

GUTACHTEN

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin

BESTELNUMMERN

- SPENDER ZUR WANDMONTAGE FÜR GREEN&CLEAN HD, HL, HW:**
- Wandspender, kurzer Hebel
1000 ml Fassungsvermögen
BESTELL-Nr.: 40200100
 - 500 ml Fassungsvermögen
BESTELL-Nr.: 40200104
 - Wandspender, langer Hebel
1000 ml Fassungsvermögen
BESTELL-Nr.: 40200101
 - 500 ml Fassungsvermögen
BESTELL-Nr.: 40200102



GREEN&CLEAN MB
Praktischer Bürstenreiniger auf Zitronensäure- und Enzymbasis zur gründlichen Reinigung des Mundspülbeckens.

- ▶ Löst Kalk- und Farbablagerungen
- ▶ Ausgezeichnete Eiweißlösekraft durch Enzymanteil
- ▶ Ideal für sämtliche Amalgamabscheider

BESTELNUMMERN

- GREEN&CLEAN MB Einführset 2 x 500 ml + 2 Flaschen + 2 Bürsten
BESTELL-Nr.: 60020001
- GREEN&CLEAN MB Nachfüllset 1 4 x 500 ml + 4 Bürsten
BESTELL-Nr.: 60020002
- GREEN&CLEAN MB Nachfüllset 2 4 x 500 ml
BESTELL-Nr.: 60020004
- GREEN&CLEAN MB Ersatzbürsten 4 Bürsten
BESTELL-Nr.: 60020008

BESTELNUMMERN



GREEN&CLEAN WK
Konzentrat zur Desinfektion der Wasserwege in zahnärztlichen Behandlungseinheiten.

- ▶ CE 0408
- GREEN&CLEAN WK Nachfüllset 1 4 x 500 ml Beutel
BESTELL-Nr.: 60040100
- GREEN&CLEAN WK Nachfüllset 2 für METASYS WEK in Ultradent Dentaleinheiten 6 x 1000 ml
BESTELL-Nr.: 60040101



HYGIENESYSTEM H1
Desinfektionspräparat / Konzentrat für das automatische Hygienesystem H1.

- ▶ CE 0408
- GREEN&CLEAN H1 Nachfüllset 4 x 500 ml Beutel
BESTELL-Nr.: 60010021

BESTELNUMMERN



DENTAL XR
Einteilige Entwickler- und Fixierlösungen

- ▶ Einfaches und schnelles Anmischen
- ▶ Optimale Bildqualität: mit allen handelsüblichen Röntgenfilmen getestet
- ▶ Konstante Entwicklungsergebnisse über die gesamte Standzeit

BESTELNUMMERN

- FÜR FOLGENDE ENTWICKLUNGSMASCHINEN:**
DÜRR AC 245, XR 24, XR 25, XR 24 PRO, XR 24 NOVA
Phillips, Clarimat Super SII / III
Velopex DE 260 (4 l), Clarimat GX 300 (4 l)
Girardelli X-20, X-24
- METASYS DENTAL XR:
2 x Entwicklerkonzentrat
2 x Fixierkonzentrat
für je 5 Liter gebrauchsfertige Lösung
BESTELL-Nr.: 10110001



GREEN&CLEAN IK
Gebrauchsfertiger, alkoholischer Desinfektionsspray für die Spray- und Kühlwasserführenden Leitungen von Hand- Winkelstücken und Turbinen.

- ▶ erhöhte Anwendungssicherheit durch fix montierte Adapter
- ▶ eine Spraydose reicht für ca. 300 Anwendungen bei ca. 2 Sekunden Sprühdauer
- ▶ ein Universaladapter für alle Hand- und Winkelstückkupplungen und eigene Adapter für die gängigsten Hersteller von Turbinen
- ▶ Desinfektionslösung VAH/DGHM gelistet
- ▶ ersetzt nicht die vom Hersteller empfohlene Ölung!
- ▶ Werksfreigabe (W&H, Sirona)
- ▶ CE 0408

WIRKUNGSSPEKTRUM

WIRKUNGSSPEKTRUM:
HBV/HIV/HCV: 15 Sekunden
bakterizid/fungizid: 2 Minuten
tuberkulozid: 2 Minuten

BESTELNUMMERN

MODERNE WIRKSTOFFKOMBINATION:
Alkohole, quartäre Ammoniumverbindung und Hilfsstoffe.

- GREEN&CLEAN IK Desinfektionsspray für Kupplung Hand- u. Winkelstücke 2 x 180 ml
BESTELL-Nr.: 60030182
- GREEN&CLEAN IK Desinfektionsspray für Turbinenkupplung W&H 2 x 180 ml
BESTELL-Nr.: 60030183
- GREEN&CLEAN IK Desinfektionsspray für Turbinenkupplung Bien Air 2 x 180 ml
BESTELL-Nr.: 60030184
- GREEN&CLEAN IK Desinfektionsspray für Turbinenkupplung KaVo 2 x 180 ml
BESTELL-Nr.: 60030185
- GREEN&CLEAN IK Desinfektionsspray für Turbinenkupplung Sirona 2 x 180 ml
BESTELL-Nr.: 60030186
- GREEN&CLEAN IK Desinfektionsspray für Turbinenkupplung Castellini 2 x 180 ml
BESTELL-Nr.: 60030187

GUTACHTEN

Dr. med. J. Steinmann, Bremen
Prof. Dr. med. M. Rotter, Wien
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin



GREEN&CLEAN ID N

Hochwirksames Konzentrat zur Desinfektion von Instrumenten und Medizinprodukten.

- ▶ Außerordentliche Reinigungswirkung
- ▶ Verwendbar für flexible und starre, sowie für thermolabile und -stabile Instrumente
- ▶ 5 l Konzentrat ergeben 500 l Gebrauchslösung bei 1 %-iger Anwendung
- ▶ Verhindert Korrosion zum Schutz Ihrer Instrumente
- ▶ Geeignet für die Anwendung im Ultraschallbad
- ▶ Empfehlung des Endoskop Herstellers Karl Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen (Deutschland), vom 19. Dezember 2005
- ▶ Aldehyd- und phenolfrei
- ▶ Standzeit: 7 Tage
- ▶ VAH/DGHM und ÖGHMP gelistet
- ▶ Freigabe von NTI-Kahla (Rotary Dental Instruments)
- ▶ CE 0408

WIRKUNGSSPEKTRUM:	EINWIRKZEITEN:
HBV/HIV/HCV:	
1 %-ige Lösung:	15 Minuten
Vakzinia-Viren:	
1 %-ige Lösung:	5 Minuten
bakterizid/fungizid/tuberkulozid:	
1 %-ige Lösung:	60 Minuten
2 %-ige Lösung:	15 Minuten
7,5 %-ige Lösung:	5 Minuten

MODERNE WIRKSTOFFKOMBINATION:
Quartäre Ammoniumverbindung, Alkylamin, Korrosionsinhibitoren

GREEN&CLEAN ID N
4 x 500ml + Messbecher 100 ml
BESTELL-NR.: 60300033

GREEN&CLEAN ID N
1 x 5 l Kanister
BESTELL-NR.: 60030034

Messbecher 100 ml
BESTELL-NR.: 40200003

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
Prof. Dr. med. E. Marth, Graz
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

WIRKUNGSSPEKTRUM

BESTELLNUMMERN

GUTACHTEN



METASYS DESINFEKTIONSWANNE groß
4 Liter Fassungsvermögen, Abdeckung und Abtropfeinsatz.

METASYS Desinfektionswanne groß
BESTELL-NR.: 40200008



METASYS DESINFEKTIONSWANNE klein
1,25 l Fassungsvermögen, Abdeckung und Abtropfeinsatz.

METASYS Desinfektionswanne klein
BESTELL-NR.: 40200015



METASYS BOHRERDESINFEKTIONS-DOSE
200 ml Fassungsvermögen, Abdeckung und Abtropfeinsatz.

METASYS Bohrerdesinfektionsdose
BESTELL-NR.: 40200013



METASYS KURZZEITWECKER
BESTELL-NR.: 90110012

BESTELLN.

BESTELLNUMMER

BESTELLNUMMER



GREEN & CLEAN AD

GREEN&CLEAN AD

Hochwirksame, gebrauchsfertige Lösung zur schnellen und nachhaltigen Tauchdesinfektion aller prothetischen Arbeiten und getragenen Zahnersatz, sowie zahnmedizinische Abformungen aus Silikon, Polyäther und Alginate.

- ▶ Formstabilitätsgutachten (Institut Fresenius)
- ▶ Verwendbar für Alginat, Silikone, Polyether, Hydrokolloide und Abformlöffel
- ▶ Keine Beeinflussung der Oberflächenqualität und des Dimensionsverhaltens der Abformmaterialien
- ▶ Hervorragende Reinigungswirkung
- ▶ Hohe Materialfreundlichkeit
- ▶ Formaldehyd- und phenolfrei
- ▶ Standzeit: 7 Tage
- ▶ VAH/DGHM gelistet
- ▶ CE 0408

WIRKUNGSSPEKTRUM:	EINWIRKZEITEN:
HBV/HIV/HCV:	1 Minute
bakterizid inkl. Tb:	5 Minuten
fungizid:	5 Minuten

MODERNE WIRKSTOFFKOMBINATION:
Quartäre Ammoniumverbindungen, Alkylamin, Tenside.

GREEN&CLEAN AD
1 x 5 l Kanister
BESTELL-NR.: 60030074

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
Prof. Dr. med. E. Marth, Graz
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

WIRKUNGSSPEKTRUM

BESTELLN.

GUTACHTEN

BESTELLN.

GREEN & CLEAN BR

GREEN&CLEAN BR

Gebrauchsfertige Lösung zur Entfernung von Biofilm aus dem Schlauchsystem der dentalen Einheit.

▶ CE 0408

GREEN&CLEAN BR
2 x 1000 ml Flasche
BESTELL-NR.: 60040300

BESTELLN.



GREEN & CLEAN HW

GREEN&CLEAN HW

Pflegende Händewaschlotion mit natürlichen Pflegestoffen.

- ▶ pH-Wert 5,6, dem natürlichen Säuremantel der Haut angepasst
- ▶ Sehr gut geeignet für empfindliche Haut
- ▶ Feuchthaltemittel wirken der Austrocknung der Haut auch bei häufigem Waschen entgegen
- ▶ Natürliche Pflegemittel aus Zuckerrübenextrakt

GREEN&CLEAN HW Einführset
5 x 750 ml + Dosierflasche
BESTELL-NR.: 60030041

GREEN&CLEAN HW Nachfüllset 1
6 x 750 ml
BESTELL-NR.: 60030042

GREEN&CLEAN HW Nachfüllset 2
1 x 5 l Kanister
BESTELL-NR.: 60030043

BESTELLNUMMERN

BESTELLN.

GREEN & CLEAN HC

GREEN&CLEAN HC

Die pflegende Handcreme auf Mandelölbasis zieht schnell ein, ist nicht fettend und führt der Haut und den Nägeln wertvolle Wirkstoffe zu.

- ▶ Angereichert mit Vitaminen E und B
- ▶ Geeignet für empfindliche Haut

GREEN&CLEAN HC Handcreme
6 x 100 ml Tube
BESTELL-NR.: 60030120
1 x 100 ml Tube
BESTELL-NR.: 60030122

BESTELLN.



DIE HÄNDEHYGIENE IST EINE DER WICHTIGSTEN MASSNAHMEN ZUR INFEKTIONSPROPHYLAXE!

Richtig durchgeführte Händehygiene hilft Hautprobleme zu vermeiden!
Deshalb gilt: Desinfizieren statt waschen!
(außer bei Verunreinigung)

Gesunde Haut an den Händen ist ein zusätzlicher Infektionsschutz, da Keime schwerer eindringen können!

TIPPS FÜR DIE EFFIZIENTE HÄNDEDESINFEKTION:

- Auf saubere, kurze, unlackierte Fingernägel achten
- Keine Schmuckgegenstände tragen
- Ausreichende Menge alkoholisches Händedesinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände gut einreiben (mindestens 30 sec feucht halten, bei chirurgischer Händedesinfektion 3-5 min).

HYGIENISCHE HÄNDEDESINFEKTION

- vor der Arbeitsplatzvorbereitung im Behandlungsbereich
- nach der Arbeitsplatzwartung
- vor dem An- und nach dem Ausziehen von Handschuhen
- vor und nach nichtchirurgischer Behandlung

CHIRURGISCHE HÄNDEDESINFEKTION

- vor umfangreichen chirurgischen Eingriffen

HÄNDE

Tipps für richtiges Dosieren:



Immer kaltes Wasser verwenden!



Schutzhandschuhe tragen!



Dosierung unbedingt genau nach Angaben des Herstellers!



Einwirkzeiten einhalten! Standzeiten beachten!

Korrektes Anmischen am Beispiel des Flächen-desinfektionsmittels GREEN&CLEAN RD N:

Benötigte ml im Kreuzungspunkt der gewählten Konzentration und Liter ablesen!

z. B.: 0,25%-ige Lösung mit 8 Liter Wasser => 20 ml des Konzentrats verwenden!

	0,25 %	0,5 %	1,50 %
1 Lt.	2,5 ml	5,0 ml	15,0 ml
2 Lt.	5,0 ml	10,0 ml	30,0 ml
3 Lt.	7,5 ml	15,0 ml	45,0 ml
4 Lt.	10,0 ml	20,0 ml	60,0 ml
5 Lt.	12,5 ml	25,0 ml	75,0 ml
6 Lt.	15,0 ml	30,0 ml	90,0 ml
7 Lt.	17,5 ml	35,0 ml	105,0 ml
8 Lt.	20,0 ml	40,0 ml	120,0 ml
9 Lt.	22,5 ml	45,0 ml	135,0 ml
10 Lt.	25,0 ml	50,0 ml	150,0 ml



GREEN&CLEAN SD

Alkoholische Sprühdeseinfektion zur Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten (z.B. alkoholunempfindliche Oberflächen der dentalen Einheit, wie Schwebetische, Ablagen).

- ▶ Remanenzeffekt verhindert sofortige Wiederansiedlung von Anflugkeimen
- ▶ Formaldehydfrei
- ▶ VAH/DGHM und ÖGHMP gelistet
- ▶ CE 0408

WIRKUNGSSPEKTRUM: HBV/HIV/HCV: bakterizid/fungizid: tuberkulozid:

EINWIRKZEITEN: 30 Sekunden
1 Minute
5 Minuten

MODERNE WIRKSTOFFKOMBINATION: Alkohole, quartäre Ammoniumverbindungen und Glyoxal.

GREEN&CLEAN SD Einführset
5 x 750 ml Beutel + Sprühflasche
BESTELL-NR.: 60030001

GREEN&CLEAN SD Nachfüllset 1
6 x 750 ml Beutel
BESTELL-NR.: 60030002

GREEN&CLEAN SD Nachfüllset 2
1 x 5 l Kanister
BESTELL-NR.: 60030003

Sprühflasche SD
BESTELL-NR.: 40200005

Auslaufhahn f. 5 l-Kanister
BESTELL-NR.: 40200004

Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
Dr. med. J. Steinmann, Bremen



GREEN & CLEAN SK

GREEN&CLEAN SK / MK

Desinfektionsschaum / gebrauchsfertige Desinfektionstücher ohne Alkohol zur Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten (z.B. alkoholempfindliche Oberflächen der dentalen Einheit, wie Unit-Griffe, Leder- / Kunstlederbezüge der dentalen Einheit).

- ▶ Gebrauchsfertige Desinfektionslösung
- ▶ Besonders geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen von Medizinprodukten
- ▶ Remanenzeffekt verhindert sofortige Wiederansiedlung von Anflugkeimen
- ▶ Aldehyd-, phenol- und phosphatfrei
- ▶ Desinfektionslösung VAH/DGHM gelistet
- ▶ CE 0408

WIRKUNGSSPEKTRUM: HBV/HIV/HCV: bakterizid/fungizid:

EINWIRKZEITEN: 1 Minute
1 Minute

MODERNE WIRKSTOFFKOMBINATION: Quartäre Ammoniumverbindungen

GREEN&CLEAN SK Start
1 x 750 ml Sprühflasche mit Schäumer
BESTELL-NR.: 60030110

GREEN&CLEAN SK Einführset
6 x 750 ml Sprühflasche, 2 x Schäumer
BESTELL-NR.: 60030111

GREEN&CLEAN SK Nachfüllset
1 x 5 l Kanister
BESTELL-NR.: 60030112

GREEN&CLEAN MK Start
1 Spendeimer + 70 Tücher + 750 ml 1 Flasche SK
BESTELL-NR.: 60030130

GREEN&CLEAN MK Nachfüllset
1 Spendeimer + 490 Tücher + 5 l Kanister SK
BESTELL-NR.: 60030131

Prof. Dr. med. G. Frösner, München
Prof. Dr. med. E. Marth, Graz
Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main



GREEN & CLEAN WD

GREEN&CLEAN WD

Alkoholische Desinfektionstücher aus reißfestem Vlies zur Desinfektion von kleinen Oberflächen von Medizinprodukten (z.B. Außenflächen von Hand- und Winkelstücken).

- ▶ Remanenzeffekt verhindert sofortige Wiederansiedlung von Anflugkeimen
- ▶ Formaldehydfrei
- ▶ Desinfektionslösung VAH/DGHM und ÖGHMP gelistet
- ▶ CE 0408

WIRKUNGSSPEKTRUM: HBV/HIV/HCV: bakterizid/fungizid: tuberkulozid:

EINWIRKZEITEN: 30 Sekunden
1 Minute
5 Minuten


MODERNE WIRKSTOFFKOMBINATION: Alkohole, quartäre Ammoniumverbindungen und Glyoxal.

GREEN&CLEAN WD Einführset
1 x Dose mit 150 Wischtüchern, 3 x 120 Beutel
BESTELL-NR.: 60030011

GREEN&CLEAN WD Nachfüllset 1
6 x 120 Beutel
BESTELL-NR.: 60030012

GREEN&CLEAN WD Start
1 x Dose mit 150 Wischtüchern
BESTELL-NR.: 40200007

Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
Dr. med. J. Steinmann, Bremen

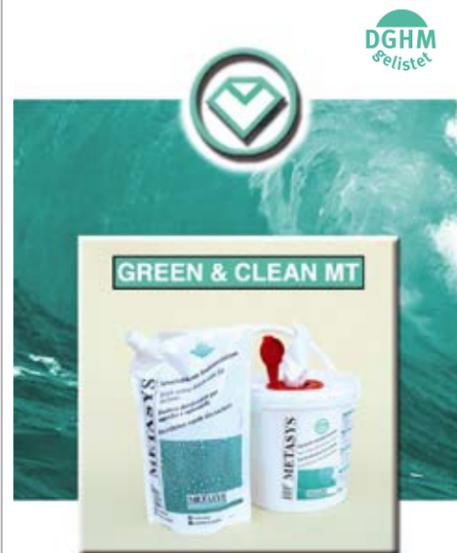

GREEN & CLEAN MT

GREEN&CLEAN MT

Extragroße, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion von großen Oberflächen von Medizinprodukten (z.B. alkoholunempfindliche Oberflächen der dentalen Einheit).

- ▶ Remanenzeffekt verhindert sofortige Wiederansiedlung von Anflugkeimen
- ▶ Formaldehydfrei
- ▶ Desinfektionslösung VAH/DGHM und ÖGHMP gelistet
- ▶ CE 0408

WIRKUNGSSPEKTRUM: HBV/HIV/HCV: bakterizid/fungizid: tuberkulozid:

EINWIRKZEITEN: 30 Sekunden
1 Minute
5 Minuten

MODERNE WIRKSTOFFKOMBINATION: Alkohole, quartäre Ammoniumverbindungen und Glyoxal.

GREEN&CLEAN MT Start
1 x Spendeimer mit 70 Tücher + 1 x 750 ml Beutel SD
BESTELL-NR.: 60030091

GREEN&CLEAN MT - Einführset 1
1 x Spendeimer mit 70 Tücher + 5 x 70 Tücher + 6 x 750 ml SD
BESTELL-NR.: 60030093

GREEN&CLEAN MT - Einführset 2
1 x Spendeimer mit 70 Tücher + 6 x 70 Tücher + 1 x 5 l SD Kanister
BESTELL-NR.: 60030094

GREEN&CLEAN MT - Nachfüllset 1
2 x Tuchrollen à 70 Tücher
BESTELL-NR.: 60030095

GREEN&CLEAN MT - Nachfüllset 2
1 x Spendeimer mit 70 Tücher + 5 x 70 Tücher
BESTELL-NR.: 60030092

Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
Dr. med. J. Steinmann, Bremen



GREEN & CLEAN RD N

GREEN&CLEAN RD N

Konzentrat zur Desinfektion von alkoholsensitiven Oberflächen von Medizinprodukten (z.B. alkoholempfindliche Oberflächen der dentalen Einheit)

- ▶ Ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- ▶ Geeignet für Acryl- und Plexiglas
- ▶ 5 l Konzentrat ergeben 2000 l Gebrauchslösung bei 0,25 %-iger Anwendung
- ▶ Aldehydfrei
- ▶ VAH/DGHM und ÖGHMP gelistet
- ▶ CE 0408

WIRKUNGSSPEKTRUM: HBV/HIV/HCV: 0,25%-ige Lösung: 60 Minuten
0,5%-ige Lösung: 30 Minuten
bakterizid/fungizid: 0,25%-ige Lösung: 4 Stunden
0,5%-ige Lösung: 1 Stunde
1,5%-ige Lösung: 30 Minuten
2%-ige Lösung: 15 Minuten
tuberkulozid: 2%-ige Lösung: 30 Minuten
4%-ige Lösung: 15 Minuten

MODERNE WIRKSTOFFKOMBINATION: Quartäre Ammoniumverbindungen und Alkylamin

GREEN&CLEAN RD N
4 x 500 ml + Dosierbecher 100 ml
BESTELL-NR.: 60030023

GREEN&CLEAN RD N
1 x 5 l Kanister
BESTELL-NR.: 60030028

RD N Dosierbecher 100 ml
BESTELL-NR.: 40200016

Prof. Dr. med. G. Frösner, München
Prof. Dr. med. E. Marth, Graz
Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
Dr. med. J. Steinmann, Bremen