

Validierte Innenreinigung.



KaVo Pflegesystem – optimale Werterhaltung



KaVo Pflegesysteme bieten seit Jahren eine praxisgerechte, effiziente und wirtschaftliche Pflege und sichern so die optimale Werterhaltung Ihrer Hand- und Winkelstücke und Turbinen.

Erhöhte Anforderungen an die hygienische Wiederaufbereitung erfordern neuerdings Verfahren zur Innenreinigung, für die ein

Validierungsnachweis über dessen Wirkungsgrad vorhanden sein muß.

KaVo bietet für diese validierte Intensiv-Innenreinigung eine sehr wirtschaftliche Lösung zur manuellen Anwendung:

KaVo CLEANspray® und KaVo DRYspray®

Zweckbestimmung:

KaVo CLEANspray ist alkoholfrei und wird im Rahmen der Wiederaufbereitung zur manuellen Intensiv-Innenreinigung von Hand-/Winkelstücken und Turbinen (Getriebe- und Spraykanäle) angewendet.

Der Nachweis der Eignung und Wirksamkeit erfolgt per Gutachten in Anlehnung an die Normserie DIN ISO 15883 und den Vorgaben der DGSV – Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung.

Anwendung:

- Winkelstück oder Turbine mittels entsprechendem Pflegeadapter mit 3 Sprühstößen für je 2 Sekunden durchsprühen und dann 1 Minute einwirken lassen.

- Anschliessend zur Trocknung mit KaVo DRYspray 3-5 Sekunden durchsprühen.

Nach dieser Intensiv-Innenreinigung sind die weiteren Schritte der Wiederaufbereitung gemäß den jeweils gültigen Empfehlungen und Vorschriften durchzuführen. Das KaVo Pflegesystem bietet Ihnen hierfür die Produkte zur optimalen Werterhaltung Ihrer Instrumente und Turbinen.

Ergebnis:

Mit der Intensiv-Innenreinigung Ihrer Instrumente und Turbinen mit KaVo CLEANspray und KaVo DRYspray haben Sie die Gewähr, die geforderten Standards zu erfüllen und in Kombination mit den weiteren Schritten der Wiederaufbereitung ein Höchstmaß an Sicherheit in Ihrer Praxis.



KaVo CLEANspray / DRYspray Starterset
(je 1 Stück + Adapterset)
REF 1.007.0573



Karton KaVo CLEANspray
(4 Dosen)
REF 1.007.0579



Karton KaVo DRYspray
(4 Dosen)
REF 1.007.0580



KaVo. Dental Excellence.