

FluoroDose®

5%iger Natriumfluoridlack mit Xylitol

Eintauchen. Mischen.
Auftragen. Fertig.

Neu
FluoroDose®
Karamell!



Centrix macht die Fluoridlackierung sicherer und das Reinigen einfacher.

FluoroDose ist ein Kavitätenlack mit 5 % Natriumfluorid in der LolliPack®-Einmalpackung, der die maximal erlaubte Fluoriddosis enthält und von der FDA für die Behandlung von Dentinhypersensibilität zugelassen ist. Jede Einheit enthält eine Einzeldosis (0,3 ml) FluoroDose und einen sauberen Benda®-Pinselapplikator, mit dem Sie den Lack vor dem Auftragen mischen können, was eine gleichbleibende Fluoridkonzentration bei jeder Anwendung garantiert. Einfach die Schutzhülle abziehen, den Pinsel eintauchen, mischen und applizieren.

Die US-amerikanische zahnärztliche Vereinigung ADA sieht Fluoridlack als sicheren und wirksamen Bestandteil eines Programms zur Kariesprävention an, das Kariesdiagnostik, Risikobeurteilung und regelmäßige Zahnpflege umfasst. Auf der Website von der ADA finden Sie mehrere Studien zur Wirkungsweise von Fluoridlacken: http://www.ada.org/prof/resources/topics/science_fluoride_varnish.asp

Eigenschaften von FluoroDose:

- Leichteres Auftragen und Reinigen dank handlicher Einheit zur Dosierung
- Einmaliges Auftragen mit einem Pinsel einfacher und sicherer als Gele und Mundspülungen
- Bei Kontakt mit Speichel in Sekundenschnelle trocken
- 6 bis 8 Stunden am Zahn für optimale Fluoridaufnahme
- In 5 Geschmacksrichtungen erhältlich: Karamell, Kaugummi, Minze, Kirsche und Melone
- 5 % Natriumfluorid (NaF) oder 22.600 ppm Fluorid
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt



Centrix macht die Keimreduktion und die Reinigung nach der Behandlung einfacher. Keine schmierenden Gele und unbequemen Löffel mehr; keine Angst mehr vor dem Verschlucken von Fluorid.



centrix®
Making Dentistry Easier.™

Anwendungen

INDIKATIONEN:

- Dient zur Behandlung von Zähnen, die auf Heißes, Kaltes und Süßes am Zahnhals empfindlich reagieren.
- Beugt durch Verschließen der Dentintubuli dem Zahnverfall bei älteren Patienten vor, die Schwierigkeiten beim Reinigen ihrer Zähne haben.
- Die Lackierung sollte bei Kindern mit hohem Kariesrisiko alle drei Monate und bei Kindern mit geringem Risiko alle sechs Monate aufgefrischt werden.

KONTRAINDIKATIONEN:

Kinder mit geringem Kariesrisiko, die optimal fluoridiertes Wasser trinken, oder Kinder, die vom Zahnarzt regelmäßig mit Fluorid behandelt werden

VERWENDUNGSHINWEISE:

1. Zähne reinigen und überschüssige Flüssigkeit vom zu behandelnden Bereich entfernen.
2. Die Folienabdeckung langsam abziehen, um den Pinselapplikator und die Lackschale freizulegen.
3. Den Pinselapplikator entfernen und das Material in der Schale verrühren.
4. Eine dünne Schicht Lack auf den Behandlungsbereich auftragen.
5. Den Lack etwa 10 Sekunden lang trocknen lassen und den Patienten dann bitten, den Mund zu schließen.
6. Die Verpackung und den Applikator nach der Verwendung entsorgen.
7. Der Patient kann sofort nach der Behandlung die Praxis verlassen. Dem Patienten muss mitgeteilt werden, dass er für zwei Stunden nach der Behandlung nur weiche Speisen und kalte Getränke zu sich nehmen und mindestens 4 bis 6 Stunden nicht die Zähne putzen darf.
8. Im trockenen Zustand kann der überschüssige Lack „fleckig“ wirken und von der Zahnoberfläche gleiten. Die Wirksamkeit des Produkts wird dadurch nicht beeinträchtigt, da sich noch eine unversehrte Lackschicht auf dem Zahn befindet.

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr. 360137 FluoroDose, Karamell, 120
Art.-Nr. 360087 FluoroDose, Kaugummi, 120
Art.-Nr. 360086 FluoroDose, Minze, 120
Art.-Nr. 360107 FluoroDose, Melone, 120
Art.-Nr. 360110 FluoroDose, Kirsche, 120

Art.-Nr. 360138 FluoroDose, Karamell, 600
Art.-Nr. 360077 FluoroDose, Kaugummi, 600
Art.-Nr. 360078 FluoroDose, Minze, 600
Art.-Nr. 360108 FluoroDose, Melone, 600
Art.-Nr. 360111 FluoroDose, Kirsche, 600

Art.-Nr. 360139 FluoroDose, Karamell, 1200
Art.-Nr. 360106 FluoroDose, Kaugummi, 1200
Art.-Nr. 360105 FluoroDose, Minze, 1200
Art.-Nr. 360109 FluoroDose, Melone, 1200
Art.-Nr. 360112 FluoroDose, Kirsche, 1200



Neu
FluoroDose®
Karamell!

**Bestellen ist einfach. Rufen Sie kostenfrei unter 0800 2368749
an oder wenden Sie sich an Ihren bevorzugten Händler.
Weitere Informationen unter www.centrixdental.de.**

