

Starten Sie durch mit

# SpeedCEM



Selbstadhäsiver, universeller Compositezement



ivoclar  
vivadent®  
passion vision innovation

# SCHNELL

# EINFACH

SpeedCEM ist ein selbstadhäsiver, selbsthärtender Compositezement mit optionaler Lichthärtung. Er eignet sich für die schnelle und einfache Zementierung ohne Anwendung von Haftvermittlern und ohne separate Konditionierung mit Phosphorsäure.

SpeedCEM muss nicht von Hand angemischt werden und benötigt auch kein zusätzliches Verarbeitungszubehör, wie es für Mischkapsel-Produkte erforderlich ist.

SpeedCEM ist in der Verarbeitung noch einfacher als ein konventioneller Zement und bietet die zusätzlichen Vorteile eines Befestigungscomposits:

- selbsthärtend mit optionaler Lichthärtung
- höhere Festigkeit
- gute Haftwerte
- höhere Transluzenz
- geringere Wasserlöslichkeit
- Röntgensichtbarkeit

## EINFACHER GEHT ES NICHT:

- keine Phosphorsäure-Ätzung
- keine Primer, Bondings oder Haftvermittler für Schmelz und Dentin
- keine Handanmischung
- keine Mischkapseln
- keine Mischgeräte
- keine Kapsel-Aktivatoren
- keine Ausdrückgeräte oder Injektoren

SpeedCEM wird beim Ausdrücken aus der Doppelspritze fertig angemischt und direkt in die Restauration appliziert.



### Klinischer Fall von: Ronny Watzke, ZA; Franz Perkon, ZT



Ausgangssituation

Applikation von SpeedCEM

Einsetzen der Brücke

Lichtaktivieren der Zementüberschüsse (Viertel-Technik)

Überschussentfernung

Fertige Restauration

# SpeedCEM


# VIELSEITIG

SpeedCEM ist geeignet für die selbstadhäsive Befestigung von indirekten Restaurationen aus:

- Metall und Metallkeramik
- hochfester Vollkeramik (Zirkoniumoxid-, Lithiumdisilikat- und Aluminiumoxid-Keramik)
- faserverstärktem Composite



SpeedCEM enthält ein saures Adhäsiv-Monomer, stabil in der Composite-Matrix integriert.

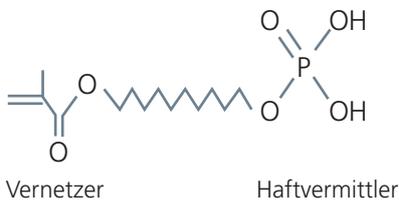


SpeedCEM ist in drei Farben mit unterschiedlicher Transparenz erhältlich.



Die SpeedCEM-Formulierung basiert auf der langjährigen Erfahrung mit Befestigungscompositis wie z.B. Variolink II und Multilink Automix.


SpeedCEM bietet auch im Vergleich zu Mitbewerberprodukten hervorragende Materialeigenschaften wie:

## SCHERHAFTWERTE (nach Selbsthärtung)

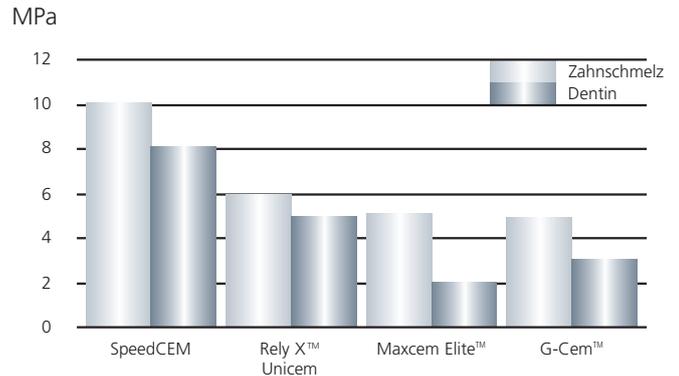


Scherhaftprüfung  
ISO TS-11405  
F&E, Ivoclar Vivadent AG  
Dezember 2008

## BIEGEFESTIGKEIT (nach Lichthärtung)

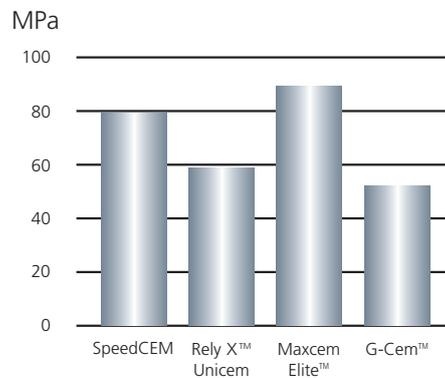

Testmethode gemäss  
ISO-4049:2000,  
F&E, Ivoclar Vivadent AG  
Dezember 2008

## RÖNTGENSICHTBARKEIT

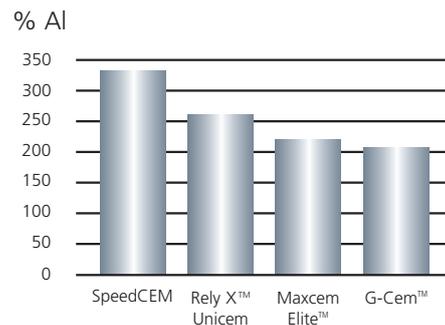

Testmethode gemäss  
ISO 4049:2000,  
F&E, Ivoclar Vivadent AG  
Dezember 2008

Rely X Unicem, G-Cem™ und Maxcem Elite™ sind keine eingetragenen Marken der Ivoclar Vivadent.

# SpeedCEM

SCHNELL • EINFACH • VIELSEITIG

## LIEFERFORMEN

### Refill Transparent 627590AN

- 1 Automix syringe SpeedCEM transparent, 9 g
- 15 Mixing tips



### Refill Yellow 627591AN

- 1 Automix syringe SpeedCEM yellow, 9 g
- 15 Mixing tips



### Refill Opaque 627592AN

- 1 Automix syringe SpeedCEM opaque, 9 g
- 15 Mixing tips



### Refill Mixing Tips 592225

- 15 Mixing tips




### Refill Wurzelkanal Tips 603018

- 5 Mixing tips
- 5 Intra Canal tips



SpeedCEM ist besonders geeignet für

**PS e.max** | **PS InLine** | **PS InLine PoM** | **PS d.SIGN** | **SF Adoro** | **FRC Postec Plus**

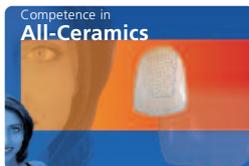

Dies ist ein Produkt aus unserem Kompetenzfeld „All-Ceramics“. Produkte aus diesem Bereich sind jeweils optimal aufeinander abgestimmt.

Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften.  
Gedruckt in Liechtenstein  
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein  
627706/0609/d/BVD

Hersteller und Vertrieb  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
FL-9494 Schaan  
Fürstentum Liechtenstein  
Tel. +423 / 235 35 35  
Fax +423 / 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Vertrieb Deutschland  
**Ivoclar Vivadent GmbH**  
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2  
D-73479 Ellwangen, Jagst  
Tel. +49 (0) 79 61 / 8 89-0  
Fax +49 (0) 79 61 / 63 26  
[info@ivoclarvivadent.de](mailto:info@ivoclarvivadent.de)  
[www.ivoclarvivadent.de](http://www.ivoclarvivadent.de)

**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation