



Stay-put

by **ROEKO**

**Effektiv – effizient –
perfekte Retraktion**

Effektiv – effizient – perfekte

Perfekte Retraktion mit *Stay-put*

Bei der Vorbereitung eines Abdrucks tauchen immer wieder die gleichen Probleme auf. Viele Retraktionsfäden erweisen sich als schwer formbar. Sie lassen sich nur mit Mühe im Sulkus platzieren und einmal platziert schnappen sie leicht auf oder verrutschen.

Bei *Stay-put* gibt es diese Probleme nicht. Der Faden bleibt so liegen wie Sie ihn legen.

Stay-put imprägniert



Stay-put kombiniert auf geniale Weise die Qualität eines geflochtenen Retraktionsfadens mit der Formbarkeit eines hauchdünnen Drahtes. Die formbare Seele stabilisiert den Faden und bewirkt, dass er seine gewünschte Form behält. *Stay-put* lässt sich leicht in den Sulkus einbringen und bleibt in der gewünschten Position. Ein Überlappen des Fadens ist nicht notwendig. *Stay-put imprägniert* ist mit Aluminiumchlorid imprägniert. Dessen adstringierende Eigenschaften stillen zusätzlich kleinere Blutungen des Zahnfleischsaumes. Ohne Epinephrin bleibt der Kreislauf des Patienten geschont.

Effektiv und effizient in der Anwendung:

Stay-put imprägniert stoppt Blutungen schnell und effektiv, ein Nachstopfen des Fadens entfällt und spart somit Zeit und Arbeit.

Retraktion

Vorteile von *Stay-put* imprägniert

- schnelle Blutstillung
- keine Kreislaufbeeinträchtigung
- farbcodiert zur einfachen Größenunterscheidung
- bietet einen guten Kontrast zur Gingiva
- behält die Vorformung
- verrutscht nicht
- leicht zu stopfen
- bleibt im Sulkus liegen
- Überlappen des Fadens ist nicht notwendig





Die Applikation ist so einfach:

Mit einer scharfen Schere ein Stück Faden abschneiden, das dem Umfang des Zahnes entspricht. Überlappen ist nicht notwendig.

Zuerst die Fadenmitte in den Sulkus legen.

Dann den Faden von der Mitte aus in den Sulkus stopfen.



Stay-put imprägniert ist in den Größen x-fein, fein, mittel und stark erhältlich.

Stay-put nicht imprägniert

Die bewährte nicht imprägnierte Version von *Stay-put*. Sie behalten die Flexibilität, den Faden direkt vor der Behandlung und mit dem Adstringens Ihrer Wahl zu imprägnieren.



Zubehör


Mit den **Retraktionsfaden-stopfern** von Roeko erleichtern Sie sich das Legen des Retraktionsfadens. Seitliche Einkerbungen an den Enden verhindern ein Wegrutschen des Fadens.



Kennen Sie **Comprecap** schon?

Verwenden Sie *Comprecap* in Kombination mit *Stay-put*.

Comprecap übt zusätzlichen Druck auf den Retraktionsfaden und die Gingiva aus und stillt Blutungen durch Kompression. Nach Entfernen von *Comprecap* finden Sie ein ideales Arbeitsfeld vor: der Zahnstumpf ist trocken, der Sulkus weit geöffnet, die Präparationsgrenzen sind präzise erkennbar.

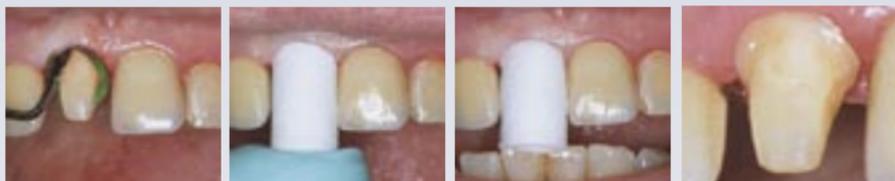

Comprecap anatomic

Anatomisch geformte Kompressionshütchen, die durch die halbkreisförmigen Ausstanzungen an zwei gegenüberliegenden Seiten optimal an die Anatomie der Zahnreihe angepasst sind.



Mit *Stay-put* und *Comprecap* erzielen Sie ein ideales Arbeitsfeld für die Abdrucknahme mit AFFINIS – beeindruckend frei von Blasen und Pressfahnen, daher perfekte Abformungen.

Bestellinformationen

Stay-put imprägniert

x-fein	REF 521 020
fein	REF 521 021
mittel	REF 521 022
stark	REF 521 023

Stay-put nicht imprägniert

x-fein	REF 521 000
fein	REF 521 001
mittel	REF 521 002
stark	REF 521 003

Comprecap anatomic

	Inhalt	REF
Set (1/3/5)	120 Stk.	531 299
Einzelgrößen		
1	120 Stk.	531 201
3	120 Stk.	531 203
5	60 Stk.	531 205

Comprecap

	Inhalt	REF
Set (1/3/5)	150 Stk.	530 000
Einzelgrößen		
1	120 Stk.	530 008
1	600 Stk.	531 008
3	120 Stk.	530 010
3	600 Stk.	531 010
5	60 Stk.	530 014
5	400 Stk.	531 014

Retraktionsfadenstopfer

glatt	REF 520 000
gezahnt	REF 520 001

Fordern Sie Informationsmaterial an oder besuchen Sie uns im Internet:
www.coltenewhaledent.com

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstraße 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau/Germany
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
productinfo@coltenewhaledent.de

coltène 
whaledent®