

# Telio<sup>®</sup>

Alles für Provisorien



ivoclar  
vivadent<sup>®</sup>  
passion vision innovation

# Telio®

## Mit richtig geplanten Provisorien zu erfolgreichen finalen Restaurationen

Das Provisorium nimmt eine zentrale Rolle in der Behandlungsplanung ein. Es ermöglicht bereits einen Ausblick auf das Endergebnis. Funktion, Phonetik und Ästhetik der definitiven Versorgung werden vorbestimmt und können jederzeit noch angepasst werden. Das ist der Schlüssel zur erfolgreichen permanenten Restauration.

Die Lösung für diesen essenziellen Behandlungsschritt heisst Telio®, ein komplettes Produktsystem für Provisorien mit unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten.



Provisorium

Perfekte finale Restauration durch geplantes Provisorium.  
Dr. Andreas Kurbad, Deutschland

**Telio umfasst Materialien für Kurz- bis Langzeitprovisorien, über den gesamten Behandlungsprozess hinweg. Die Produkte sind chemisch und farblich kompatibel – für Verlässlichkeit und Flexibilität.**

## Ein komplettes System für jeden Anspruch

Für jede Phase im Behandlungsablauf bietet Telio ein entsprechend abgestimmtes Angebot. Es gibt spezielle Materialien zur Herstellung von Provisorien mit einer kurzen Tragedauer, aber auch Produkte für massgeschneiderte Lösungen, wie sie bei Provisorien mit mittlerer bis langer Tragedauer und hohen funktionellen und ästhetischen Ansprüchen gewünscht werden.


Für Ihre Flexibilität und aus Anwenderfreundlichkeit sind alle Telio-Produkte materialtechnisch kompatibel und farblich optimal aufeinander abgestimmt.

Telio ist die kompatible Systemlösung für Provisorien.



## Telio – das flexible System für alle temporären Indikationen ...

- ↳ ... erhöht Ihre Flexibilität bei der Wahl der temporären Restauration in Abhängigkeit von der klinischen Situation und der Patientenerwartung.
- ↳ ... vermeidet durch die Kompatibilität der Produkte zeit- und kosten-  
aufwendige (Wieder-)Anfertigungen.
- ↳ ... bietet Ihnen die besten Voraussetzungen für den definitiven, ästhe-  
tischen und funktionsgerechten Zahnersatz.

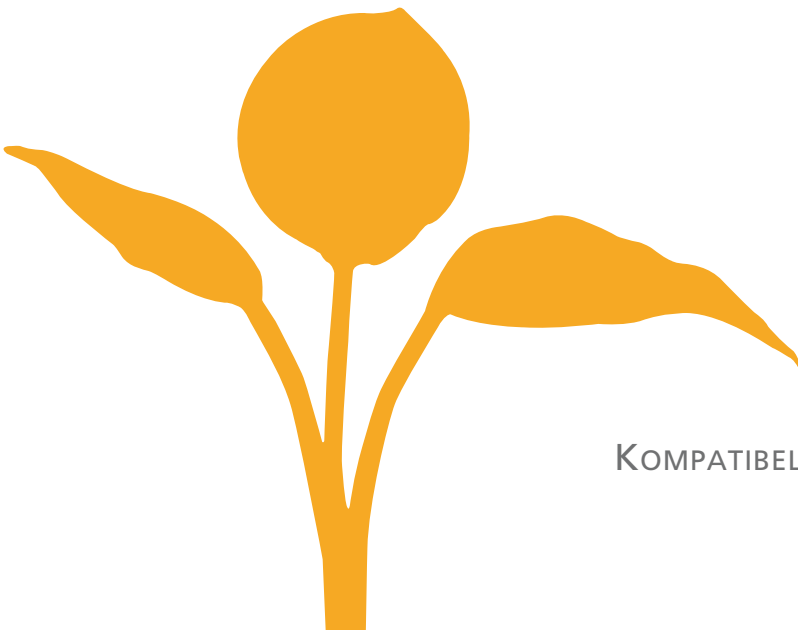

KOMPATIBEL – EINFACH – ÜBERSICHTLICH

# Telio® CS

Für Zahnärzte



Telio CS bietet Produkte für die Herstellung der gesamten Vielfalt an Provisorien direkt beim Zahnarzt. Dazu kommen ergänzende Produkte.

Telio CS C&B ist ein selbsthärtendes, temporäres Kronen- und Brückenmaterial für die Herstellung von Provisorien mit kurzer Tragedauer, direkt beim Zahnarzt. Aufgrund der farblichen Abstimmung eignet sich das Material perfekt als Unterfütterungsmaterial von Restaurationen, gefertigt aus Telio CAD und Telio Lab.

Darüber hinaus ermöglichen die lichthärtenden Einkomponentenmaterialien Telio CS Inlay und Telio CS Onlay die Versorgung von Kavitäten der Klasse I und II ohne Verwendung eines provisorischen Zementes.

Vervollständigt werden die Telio-CS-Produkte durch einen Desensibilisierer (Telio CS Desensitizer) und geeignete Zemente (Telio CS Link, Telio CS Cem Implant) zur temporären Eingliederung.

KURZE BEHANDLUNGSZEIT

# Telio<sup>®</sup> CAD

Für CAD/CAM-Anwender



Telio CAD bietet besonders wirtschaftliche Lösungen. Gefertigt in der Frästechnik, geeignet für Provisorien mit mittlerer Tragedauer.

Telio CAD ist ein hochvernetzter Polymer-Block für das Schleifen provisorischer Versorgung, der sich durch eine grosse Homogenität auszeichnet. Die Verarbeitung von Telio CAD kann wahlweise mit einem System der CAD/CAM Partner oder über externe Fräszentren erfolgen\*.

Durch den optimierten Fertigungsprozess entsteht eine glatte Oberfläche der Restauration, die sich schnell und effizient polieren lässt. Für ästhetische Versorgung kann der Inzisalbereich mit Schichtmassen und lichthärtenden Malfarben oder mit Telio Lab individualisiert werden.

\*Weitere Informationen gibt es bei Ivoclar Vivadent AG ([www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)).

# Telio® Lab

Für Zahntechniker



Mit Telio Lab fertigen Sie Langzeitprovisorien, auch komplexe Patientenfälle lassen sich damit gut lösen. Dadurch wird der Grundstein für eine erfolgreiche definitive Versorgung gelegt.

Telio Lab ist ein Kunststoff zur Herstellung von Langzeitprovisorien in der Cold-Technik. Telio Lab eignet sich für metallgestützte und metallfreie Kronen und Brücken sowohl auf natürlichen Zahnstümpfen wie auch auf Implantat-Abutments. Darüber hinaus eignen sich Telio Lab-Restaurationen als Instrument der Therapieplanung, zur Form- und Phonetikkontrolle sowie harmonischen Gingivaergänzung.

Komponenten von Telio Lab LC bestehen aus lichthärtenden, pastösen Schneidmassen und fließfähigen Malfarben. Sie werden zur Individualisierung und Ergänzung von Telio-Versorgungen verwendet. Neben der Cut-back-Technik können sie zum Antragen eines Emergenzprofils und zum Aufbau von Okklusionen verwendet werden.

LANGE BEHANDLUNGSZEIT

## LIEFERFORMEN

### Telio CS

Telio CS C&B Starter Kit

Art.-Nr.

628244



### Telio CAD

Telio CAD for CEREC Starter Kit

Telio CAD for E4D Starter Kit

Telio CAD for PlanMill Starter Kit

631697

632883

665636



Telio CAD ist auch über Fräszentren erhältlich.

### Telio Lab

Telio Lab Starter Kit A2/A3

Telio Lab Basic Kit

Telio Lab LC Veneer Kit

628055

628054

632465



Alle Produkte sind auch als Einzelrefills erhältlich.



Dies ist ein Produkt aus unserer Kategorie Festsitzende Prothetik.  
Produkte aus dieser Kategorie sind jeweils optimal aufeinander abgestimmt.

Hersteller und Vertrieb  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35  
Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Vertrieb Deutschland  
**Ivoclar Vivadent GmbH**  
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2  
D-73479 Ellwangen, Jagst  
Tel. +49 7961 8890  
Fax +49 7961 6326  
[info@ivoclarvivadent.de](mailto:info@ivoclarvivadent.de)  
[www.ivoclarvivadent.de](http://www.ivoclarvivadent.de)