



csp | ceramic silane primer

Sicherer Verbund bei Keramikreparaturen
und Wurzelkanalstiften

Vorteile

- [vom ersten bis zum letzten Tropfen aktivierbar
- [zuverlässiger Haftverbund
- [hohe Kosteneffizienz
- [4 Jahre haltbar
- [kompatibel mit allen gängigen Kompositen auf Methacrylatbasis



Schweizer Qualitätsprodukt 

csp₁ ceramic silane primer

Sichere Haftung – vom ersten bis zum letzten Tropfen

Zum einen ist csp die ideale Ergänzung zu den glasfaserverstärkten Komposit-Stiften Saremco posts non-stop fibre, zum anderen ist es optimal für die Silanisierung von silikatischen und aluminium-oxidischen Keramiken im Fall von Keramikreparaturen. Das System besteht aus silane base und silane activator, welche im Verhältnis 2:1

angemischt werden. Durch diese „frische“ Anmischung wird immer ein optimaler Haftverbund zwischen Komposit und Keramik gewährleistet. Im Gegensatz zu prähydrolysierten Ein-Komponenten-Systemen verliert csp daher nie an Wirkung. Ein Set reicht für ca. 30 Anwendungen. Verschlungen sind silane base und silane activator vier Jahre haltbar.

Seitenzahnrestauration mit csp



Ausgangssituation mit provisorischer Füllung



Distale Wand definitiv aufgebaut und Zahn vorbereitet für Stift



Stiftbett aufbereitet




Stifteinprobe



silane base und silane activator werden im Verhältnis 2:1 angemischt

5 Min!

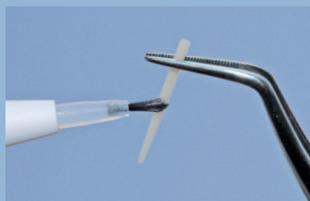

Applikation von csp auf den Wurzelstift.



Einzementierter Glasfaserstift



Nachkontrolle

Bilder eines klinischen Falls mit der Genehmigung von Herrn Dr. med. dent. M. Bachmann/Landquart, März 2010

Product	REF
csp ceramic silane primer set	
1 silane base, 3 ml 1 silane activator, 1.5 ml	7480
1 Pinselhalter 25 Pinsel 1 Tüpfelplatte	
1 Gebrauchsanweisung 1 Flow Chart	
csp ceramic silane primer refill	
1 silane base, 3 ml	7481
1 silane activator, 1.5 ml	7482
saremco posts non-stop fibre set	
je 4 Stifte (white, yellow, blue, black) je 1 Kanalbohrer	7980
1 Kanalerweiterer 1 Kontrollschablone	



Ein rundum durchdachtes, effizientes und ergiebiges Produkt – für ein sicheres Ergebnis!

Dr. med. dent. M. Bachmann/Landquart